

2018年10月（第1版）
2019年7月（第2版）
2020年9月（第3版）
2021年6月（第4版）

器類25 医療用鏡
一般医療機器 可搬型手術用顕微鏡（36354020）

特定保守管理医療機器

ダーマスコープ IDS-1100

【禁忌・禁止】


〈使用方法〉

- 1) 眼の検査には使用しないこと。
[目を傷めるおそれがあるため。]
- 2) LED光線又は電球を直視しないこと。
[目を傷めるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

本品の形状は以下のとおりである。

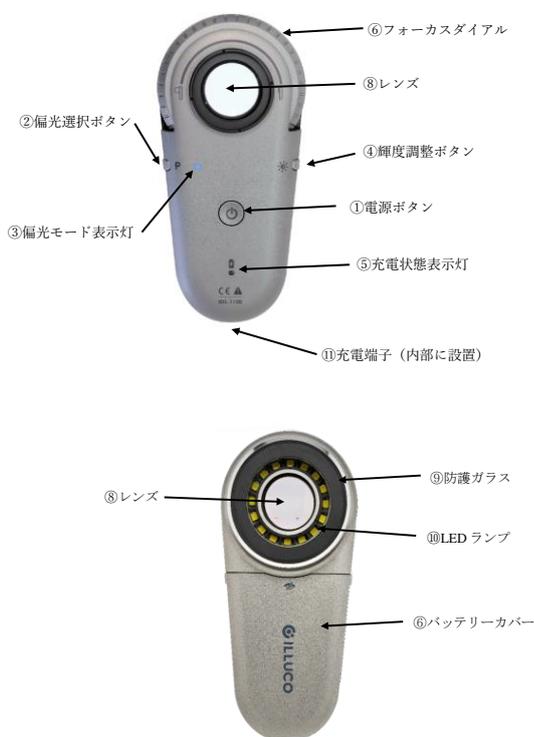

〈作動原理〉

1. 本品は、ガリレイ方式による光学設計に従い、第2レンズを通過する光線が第1レンズ通過し、眼球にて焦点を形成する方式により、各倍率換算による倍率計算法で10x倍率を獲得するものである。
2. 32個（偏光：16個、非偏光：16個）の白色LEDの偏光／非偏光選択点灯により、病巣の表皮及び皮膚内部の状態を観察できるようにしたものである。

【使用目的又は効果】

病巣の表皮及び皮膚内部の状態を拡大し、可視光線（白色LED）を用いて診療・観察をする。

【使用方法等】

（非偏光モード）

1. 電源ボタンを押して電源を入れる。
2. 保護ガラスを皮膚にあてた後、フォーカスダイヤルを操作して、病変部に焦点が当たるように調整する。
3. 輝度調整ボタンで明るさを調整する（3段階）。

（偏光モード）

1. 偏光選択ボタンを操作して、偏光白色LEDを点灯する。
2. 偏光モード表示灯（青色）の点灯を確認する。

3. 保護ガラスを皮膚にあてた後、フォーカスダイヤルを操作して、病変部に焦点が当たるように調整する。
4. 輝度調整ボタンで明るさを調整する。

【使用上の注意】

1. 患者は、顔面検査中は目を閉じなければならない。
2. オイルを使用する場合、レンズやバッテリーカバーにオイルが付着しないよう注意する。
3. フォーカスダイヤル調整時に圧力をかけすぎない。
4. 保管場所、使用場所に寒暖差がある場合、機器内部に結露が発生する可能性がある。この場合には、十分に結露が無くなるまで使用しない。
5. 磁気を発生させる装置付近では使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・保管温度（使用温度）：10℃～35℃
- ・保管湿度（使用湿度）：0%～70%（ただし、結露なきこと。）

〈保管条件〉

保管中は、水のかかる場所、高温多湿な場所、ほこりの多い場所、直射日光に当たる場所、塩分の多い場所、衝撃および振動のある場所、本品に悪影響を生ずるおそれのある場所を避けてください。
[本品は光学機器のため、破損、故障する可能性があるため。]

〈耐用期間〉

指定の保守、点検並びに消耗品の交換を実施した場合
耐用期間：7年[輸入先製造元データによる]

【取り扱い上の注意】

- 1) 最初に使用する際は、同梱専用充電ケーブルを充電端子に接続し、充電すること。
[輸入先製造元での充電が十分でない場合があるため。]
- 2) 本品の分解、加工、改造を行わないこと。
[本品は光学機器のため、破損、故障する可能性があるため。]

〈バッテリーの充電〉

1. 充電状態表示灯が橙色閃光する場合、バッテリー残量が低下しており、充電を必要とする。
2. 専用ケーブルを本体下部の充電端子に接続し、充電する。充電中は充電状態表示灯が赤色点灯する。
3. 充電が完了すると、充電状態表示灯が消灯する。

【保守・点検に係る事項】

（清掃・消毒の方法）

本品の外装クリーニング、レンズクリーニング、レンズ洗浄液、ガラス洗浄及び保護（消毒）、内部の清掃等については、取扱説明書を参照すること。

（使用者による保守点検事項）

1. 本品を正しく使用するために下記項目について使用前点検を必ず行うこと。なお、詳細については、取扱説明書を参照すること。

項目	内容
外観	傷や汚れが無いこと。
電源	充電状態表示灯により、バッテリー残量を確認する。
機能・動作	<ul style="list-style-type: none"> ・全てのLEDが点灯する。 ・フォーカス調整が行える。 ・偏光選択ボタンにより偏光／非偏光の切り換えが行える。 ・偏光モード時に偏光モード表示灯（青色）が点灯する。

本品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

2. 定期点検についても、取扱説明書を参照して行うか、弊社営業員にご相談下さい。

【主要文献及び文献請求先】

クレシオ株式会社
〒111-0051 東京都台東区蔵前 3-1-10 蔵前セントラルビル 7F
電話番号: 03-5833-9040

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

クレシオ株式会社

<外国製造業者>

イルコ社(韓国)

ILLUCO CO., LTD (Korea)