

器類 2 5 医療用鏡
一般医療機器 可搬型手術用顕微鏡（36354020）

特定保守管理医療機器

ダーマスコープ IDS-1000

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 1) 眼の検査には使用しないこと。
[目を傷めるおそれがあるため。]
- 2) LED 光源を直視しないこと。
[目を傷めるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞

本品の形状は以下のとおりである。



＜作動原理＞

本品は電源制御部から定格電圧を供給された後、LED 制御部へ電流が流入し LED 光源が皮膚へ発散され、反射した光と映像を光学系のレンズを通過して肉眼により皮膚部位を診察、観察する機器である。

【使用目的又は効果】

本品は、表皮及び皮膚内部の診療・観察をする目的で、可視光線（白色 LED）を用いた医療用顕微鏡である。

【使用方法等】

- 1) 電源ボタンを押して電源を入れる。
- 2) 偏光／非偏光切換え回転スイッチを操作して偏光／非偏光モードを選択する。
- 3) 保護ガラスを皮膚観察部位に密着させ、観察する。
- 4) オイルを使用する場合には、偏光モードを選択して観察する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 患者は顔面検査中に目を閉じなければならない。
- 2) オイルを使用する場合、レンズやバッテリーカバーにオイルが付かないように注意する。
- 3) 濡れた手で操作はしない。
- 4) 熱を発生させる装置付近では使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・保管温度（使用温度）：10℃～35℃
- ・保管湿度（使用湿度）：30%～75%（ただし、結露なきこと。）

＜保管条件＞

保管中は、水のかかる場所、45℃以上の高温多湿な場所、ほこりの多い場所、直射日光に当たる場所、塩分の多い場所、衝撃および振動のある場所、本品に悪影響を生ずるおそれのある場所を避けてください。
[本品は光学機器のため、破損、故障する可能性があるため。]

＜耐用期間＞

指定の保守、点検並びに消耗品の交換を実施した場合
耐用期間：5年[輸入先製造元データによる]

【取り扱い上の注意】

- 1) 本品専用バッテリー以外の製品を使用しないこと。
[本品が損傷する可能性があるため。]
- 2) 本品の分解、加工、改造を行わないこと。
[本品は光学機器のため、破損、故障する可能性があるため。]

【保守・点検に係る事項】

＜清掃・消毒の方法＞

本品の外装クリーニング、レンズクリーニング、レンズ洗浄液、ガラス洗浄及び保護（消毒）、内部の清掃等については、本品取扱説明書を参照すること。

＜使用者による保守点検事項＞

- 1) 本品を正しく使用するために下記項目について使用前点検を必ず行うこと。なお、詳細については、取扱説明書を参照すること。

項目	内容
外観	外観に傷や汚れが無いこと。
電源	・バッテリー容量低下表示灯の確認。 ・電源オン、オフ操作が行える。
機能・動作	・全ての LED が点灯する。 ・偏光／非偏光が行える。

- 2) 定期点検についても、取扱説明書を参照して行つか、弊社営業員にご相談下さい。

【主要文献及び文献請求先】

クレシオ株式会社
〒111-0051 東京都台東区蔵前 3-1-10 蔵前セントラルビル 7F
電話番号：03-5833-9040

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞
クレシオ株式会社

＜外国製造業者＞
イルコ社（韓国）
ILLUCO CO., LTD (Korea)