

機械器具 (12) 理学診療用器具
一般医療器 弾性ストッキング JMDN31724000

SOLIDEA 着圧ウェア

【警告】

- ・ 次の患者への使用の際は、特に注意すること。
- 1) 急性期の深部静脈血栓症の患者。[肺血栓塞栓症を発症するおそれがある。]
- 2) 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者。[圧迫により症状が悪化するおそれがある。]
- 3) 装着部に神経障害のある患者。[痛み等の異常を認識できないおそれがある。]
- 4) 糖尿病により下肢知覚障害のある患者。[血行障害等の異常を認識できないおそれがある。]
- 5) 過敏症のある患者。[接触性皮膚炎のおそれがある。]

【禁忌・禁止】


- ・ 重度の血行障害、うっ血性心不全の患者。[圧迫による症状悪化のおそれがある。]
- ・ 感染性静脈炎の患者。[菌血症や敗血症により症状が増悪するおそれがある。]
- ・ 装着部位に極度の変形がある患者。[適切な圧迫ができないおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

■ 素材：ナイロン・ポリウレタン・コットン

<形状及び寸法>


● アームスリーブタイプ

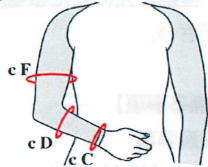

(cm)

	サイズ	S	M	L
cC	手首周囲	13.0~16.0	16.0~19.0	19.0~22.0
cD	前腕部周囲	20.0~24.0	24.0~28.0	28.0~32.0
cF	上腕部周囲	22.0~30.0	30.0~37.0	36.0~43.0


● ハイソックスタイプ

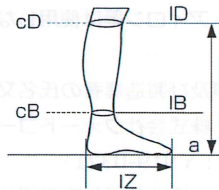

(cm)

	サイズ	S	M	L	XL
cB	足首周囲	19.0~21.0	20.0~22.0	23.0~25.0	25.0~28.0
cD	膝下周囲	29.0~34.0	32.0~37.0	38.0~43.0	41.0~46.0
着用時の地面からの丈					
IB	足首まで	8.0~10.0	9.0~11.0	10.0~11.0	11.0~12.0
ID	膝下まで	34.0~39.0	36.0~42.0	37.0~44.0	39.0~46.0
	サイズ	S	M	L	XL
IZ	足のサイズ	21.5~23.0	23.5~25.0	25.5~27.5	28.0~29.5


● ストッキングタイプ

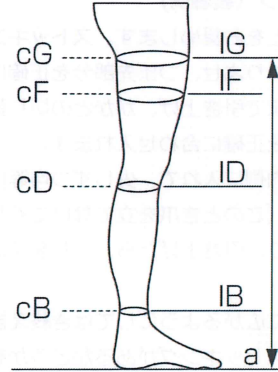

(cm)

	サイズ	S	M	ML	L
cB	足首周囲	19.0~21.0	20.0~22.0	22.0~24.0	23.0~25.0
cD	膝下周囲	29.0~34.0	32.0~37.0	35.0~40.0	38.0~43.0
cF	大腿部中央周囲	44.0~51.0	47.0~54.0	50.0~57.0	54.0~61.0
cG	大腿部上部周囲	49.0~55.0	52.0~58.0	55.0~61.0	59.0~65.0
着用時の地面からの丈					
IB	足首まで	8.0~10.0	9.0~11.0	10.0~11.0	10.0~11.0
ID	膝下まで	34.0~39.0	36.0~42.0	37.0~44.0	39.0~46.0
IF	大腿部中央まで	51.0~58.0	53.0~60.0	56.0~64.0	58.0~66.0
IG	大腿部上部まで	62.0~71.0	65.0~74.0	68.0~78.0	71.0~81.0

● パンティストッキングタイプ

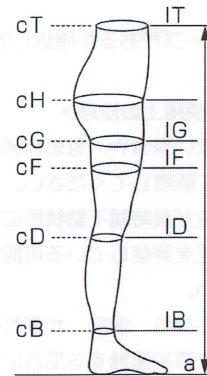

(cm)

	サイズ	S	M	ML	L
cB	足首周囲	19.0~21.0	20.0~22.0	22.0~24.0	23.0~25.0
cD	膝下周囲	29.0~34.0	32.0~37.0	35.0~40.0	38.0~43.0
cF	大腿部中央周囲	44.0~51.0	47.0~54.0	50.0~57.0	54.0~61.0
cG	大腿部上部周囲	49.0~55.0	52.0~58.0	55.0~61.0	59.0~65.0
cH	臀部中央周囲	80.0~95.0	85.0~100.0	90.0~110.0	95.0~120.0
着用時の地面からの丈					
IB	足首まで	8.0~10.0	9.0~11.0	10.0~11.0	10.0~11.0
ID	膝下まで	34.0~39.0	36.0~42.0	37.0~44.0	39.0~46.0
IF	大腿部中央まで	51.0~58.0	53.0~60.0	56.0~64.0	58.0~66.0
IG	大腿部上部まで	62.0~71.0	65.0~74.0	68.0~78.0	71.0~81.0

【使用目的又は効果】

- ・末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加えることにより、下肢または上肢の静脈血・リンパ液のうっ滞を軽減または予防する等、静脈還流の促進の為に用いる。

【操作方法または使用方法等】

・ストッキングタイプ、パンティストッキングタイプ、ハイソックスタイプ（装着例）

1. 座って履くことをお奨めします。ストッキングを丸めてつま先までたぐりよせ、つま先部分を正確に入れます。
2. 足首のところまで引き上げ、かかとの切り替え部分にかかとの位置を正確に合わせ入れます。
3. 両手の親指を内側に入れて、少しずつ均等に引き上げていきます。（このとき爪を立てないでください。）
4. 上まで引っ張り、引き上げたら、しわを伸ばしてください。
5. 脚全体に丁寧に広がるようにしてはき終わります。
6. 正しい位置にストッキングがあるかどうかを確認してください。

・アームスリーブタイプ（装着例）

1. はじめにスリーブは体の前に持ち、腕を片方ずつ入れていきます。
2. 片方のスリーブに手首と肘が隠れるまで少しずつ引き上げます。（このとき爪を立てないでください。）
3. 二の腕から肩まで均一に伸ばしながら引っ張り、引き上げたらしわを伸ばします。
4. もう片方のスリーブに2.3.と同様、手首から入れて肘へと引っ張ります。
5. 二の腕、肩まで均一に引き上げ、しわを伸ばします。
6. 胸側にある生地を両手で持ち上げ、頭を通すようにして背中側へ持っていきます。
7. しわを伸ばし、全体に丁寧に広がるようにして装着を終えます。
8. 正しい位置にスリーブがあるか確認してください。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・患者の意識レベルが低い場合や、意思疎通の困難な場合には患者の状態を良く観察してください。
- ・外傷等により装着部位が長時間不動状態にある患者は、潜在的に深部静脈血栓を発症している可能性があるため注意してください。
- ・装着部に傷、痛み、しびれ、湿疹、かぶれ等の異常がある場合や本品が開放創に直接接触する場合には使用しないでください。[症状が悪化するおそれがあるため。]
- ・本品の使用により、疼痛、しびれ、爪の変色、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及び装着時の違和感を感じた場合には使用を中止してください。[血行障害や神経障害のおそれがあるため。]
- ・本品は折り返して使用しないでください。
- ・圧迫圧の過不足を防ぐため、定期的に装着状態を確認してください。
- ・適切なサイズを選定し、破れやほつれ等異常のないことを確認して使用してください。
- ・本品は、爪や鋭利なものとの接触により損傷するおそれがあるので注意してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・包装が破損しているものや、汚れているもの、製品に異常が見られるものは使用しないでください。

<不具合・有害事象>

- ・本品の使用に伴い、以下の不具合・有事現象が生じる可能性があります。
- 1) 重大な有害事象
 - ①チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等の血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
 - ②腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
 - ③ 皮膚障害
 - ・本品のずれ、圧迫等（特に上端のバンド部位）による皮膚潰瘍などの皮膚障害が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
 - ・急性循環不全において末梢循環が不安定な患者に使用した場合には、装着部位に血行障害が発生し壊疽等の皮膚障害が起こる可能性があるため装着部位の血流に注意してください。
- 2) その他の有害事象
本品装着部位に、発赤、水泡、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。本品を脱いだあとで皮膚障害が現れる場合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。

<貯蔵・保管方法>

- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

・洗濯の際の注意事項

1. むるま湯に中性洗剤を溶かし、洗濯ネットに入れて洗濯機洗いをしてください。（手洗い可能）
2. 塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。色物とは一緒に洗わないでください。
3. 直射日光は避け、風通しの良い場所で陰干ししてください。
4. 乾燥機、アイロン等は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社クオードコーポレーション

住所：〒919-0321

福井県福井市下河北町第11号13番地

外国製造業者：CALZIFICIO PINELLI S.R.L.

国名：イタリア

【製品のお問い合わせ先】

ソリデアジャパンカスタマーサービス

TEL：0120-952-139

受付時間：月～金 9:00～17:00（土・日・祝日は休）