

医療用品3 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDNコード：70976000）

検査・検診用PVCグローブ（REIWA GLOVES PVC）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・左右同一型（平手タイプ）
- ・パウダーフリー
- ・未滅菌
- ・主原料：塩化ビニル樹脂（非フタル酸系可塑剤使用）
- ・表面仕上げ：平滑

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材性の手袋をいう。歯科用手袋を除く。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

- 使用注意：
患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止する。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。
- 重要な基本的注意：
 - 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
 - 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
 - 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認し使用すること。
- その他の注意：
使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。源、X線、高温多湿を避けて保管すること。
- ・使用の期限
使用期限は包装に記載。
[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社グロックス
〒104-6025 東京都中央区晴海1-8-10
トリトンスクエアX棟25階

製造業者：

Zhonghong Pulin Medical Products Co.,Ltd.（中国）
Shandong Intco Medical Products Co.,Ltd.（中国）

販売元：

株式会社イメージワン
〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3
大崎ニューシティ3号館6F