

TaiyoSHiP ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【使用目的又は効果】

本品は手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する合成素材の手袋。歯科用手袋を除く。

【形状、構造及び原理等】

本品は左右一対からなる合成ゴム(ニトリルゴム)を使用した滑剤(パウダー)の付いていないパウダーフリー、非滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋である。
表面仕上げは粗面と平滑がある。

【使用方法等】

パッケージ取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

- 使用上の注意:
患者及び使用者の体質・使用状況によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止する。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。
- 重要な基本的注意:
 - 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
 - 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
 - 複数の患者には使用しないこと。
- 相互作用
薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透したりする場合があるので、確認の上、使用する。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。
・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、X 線源、電子機器の周辺等に保管しないこと。
- 使用の期限
・製造年月より 5 年[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社グロックス
〒104-6025 東京都中央区晴海 1-8-10
トリトンスクエア X 棟 25 階
TEL 03-5859-5966

製造業者：
Zhonghong Pulin Medical Products Co.,Ltd. (中国)
山東英科医療製品有限公司 (中国)

商品に関する問い合わせ先
株式会社グロックス Tel: 03-5859-5966

販売元：
大洋製薬株式会社
〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 14-16