

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDN コード:70976000)

TaiyoSHiP ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【使用目的又は効果】

本品は手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する合成素材の手袋。歯科用手袋を除く。

【形状、構造及び原理等】

本品は左右一対からなる合成ゴム(ニトリルゴム)を使用した滑剤(パウダー)の付いていないパウダーフリー、非滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋である。

表面仕上げは粗面と平滑がある。

長さ、手幅、厚さは外箱に表示。

【使用方法等】

パッケージ取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意:

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止する。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。

2. *重要な基本的注意:

- 1) 同一患者のみに使用すること。
- 2) 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 3) 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 4) 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
- 5) 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認し使用すること。
- 6) 手袋着用時は爪を切り、指輪等の使用を控える。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。
- ・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、X 線源、電子機器の周辺等に保管しないこと。

2. 使用の期限

- ・製造年月より 5 年[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社グロックス

*〒102-0073 千代田区九段北 1-11-4 井門九段下ビル 4 階

TEL 03-5859-5966

製造業者:

Zhonghong Pulin Medical Products Co.,Ltd. (中国)

山東英科医療製品有限公司 (中国)

商品に関する問い合わせ先

株式会社グロックス Tel: 03-5859-5966

販売元:

大洋製薬株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 14-16