

医療用品 3 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDNコード：70976000）

TaiyoSHiP PVCグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材性の手袋をいう。歯科用手袋を除く。

【形状・構造及び原理等】

本品は左右一対からなる滑剤（パウダー）の付いていないパウダーフリー、非滅菌の使い捨て非天然ゴム製の検査・検診用ポリ塩化ビニル手袋である。
表面仕上げは平滑。

【使用方法等】

パッケージ取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

- 使用上の注意
・患者及び使用者の体質・使用状況によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止する。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。
- 重要な基本的注意
 - 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
 - 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
 - 複数の患者には使用しないこと。
- 相互作用
・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透したりする場合があるので、確認の上、使用する。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
・水ぬれに注意し、直射日光やオゾン、高温、多湿を避けて保管する。
・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、X線源、電子機器の周辺等に保管しないこと。
- 使用の期限
・製造年月より3年〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社グロックス 〒104-6025
東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟25階
TEL 03-5859-5966

製造業者

Zhonghong Pulin Medical Products.Co.,Ltd.（中国）
山東英科医療製品有限公司（中国）

商品に関する問い合わせ先
株式会社グロックス Tel: 03-5859-5966

販売元：

大洋製薬株式会社
〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目14-16

取扱説明書を必ずご参照ください。