

医療用品3 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDNコード: 70976000)

TaiyoSHiP PVCグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材性の手袋をいう。歯科用手袋を除く。

【形状・構造及び原理等】

本品は左右一対からなる滑剤（パウダー）の付いていないパウダーフリー、非滅菌の使い捨て非天然ゴム製の検査・検診用ポリ塩化ビニル手袋である。

表面仕上げは平滑。

長さ、手幅、厚さは外箱に表示。

【使用方法等】

パッケージ取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

- 使用上の注意
 - 患者及び使用者の体質・使用状況によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止する。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。
- *重要な基本的注意
 - 同一患者のみに使用すること。
 - 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
 - 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
 - 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認し使用すること。
 - *手袋着用時は爪を切り、指輪等の使用を控える。
 - 手袋の主材料であるポリ塩化ビニルは高い熱により破損する可能性があるため、60℃以上の熱いものに触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光やオゾン、高温、多湿を避けて保管する。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械、X線源、電子機器の周辺等に保管しないこと。

2. 使用の期限

- 製造年月より3年〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社グロックス

*〒102-0073千代田区九段北1-11-4 井門九段下ビル4階
TEL 03-5859-5966

製造業者

Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd. (中国)
山東英科医療製品有限公司 (中国)

販売元:

大洋製薬株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目14-16