

*2026年 8月（第2版）
2025年 1月（第1版）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10410000014

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ（JMDNコード：16779000）

サクシオンチューブ ST6530

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

再使用禁止、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

サイズ：径 6.5mm×30cm

外観写真



2. 原理

吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって吸引する。

*【滅菌区分】

滅菌処理済み（E0 滅菌）、単回使用

【使用目的又は効果】

浸出液等を吸引により除去する際に、吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

*【材質】

PVC（ポリ塩化ビニル）

【使用方法等】

1. 使用方法

滅菌包装より無菌状態のまま取り出し、吸引器、回収容器、吸引嘴管等の接続口に接続する。

*＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ・複数の患者には使用しないこと。
- ・開封後は、速やかに使用すること。
- ・本品を折り曲げた状態や引っ張った状態で使用しないこと。
- ・包装が破損している場合は、使用しないこと。

＜その他の使用上の注意＞

本品を排液用チューブ（コネクター）、吸引器、回収容器又は吸引嘴管等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。

【保管方法】

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【使用期限】

製造年月より5年〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社グロックス

*〒102-0073 千代田区九段北 1-11-4 井門九段下ビル 4階

製造業者：

Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.(中国)

商品に関する問い合わせ先

株式会社グロックス Tel: 03-5859-5966