

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ（JMDNコード: 16779000）

サクションチューブ ST6536

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

再使用禁止、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

サイズ: 径6.5mm×36cm

外観写真



2. 原理

吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって吸引する。

【使用目的又は効果】

浸出液等を吸引により除去する際に、吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 使用方法

滅菌包装より無菌状態のまま取り出し、吸引器、回収容器、吸引嘴管等の接続口に接続する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・複数の患者には使用しないこと。
- ・開封後は、速やかに使用すること。
- ・本品を折り曲げた状態や引っ張った状態で使用しないこと。

<その他の使用上の注意>

本品を排液用チューブ（コネクター）、吸引器、回収容器又は吸引嘴管等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管条件: 水濡れに注意し、直射日光、オゾン及び高温多湿を避けて保管すること。

使用期限: 5年〔自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社グロックス 〒104-6025

東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟25階

TEL 03-5859-5966

製造業者:

Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. (中華人民共和国)