

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN コード 70977000

グローフィット・ラテックスグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。
天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者及び患者へは使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

- ・左右同一型（平手タイプ）
- ・パウダーフリー
- ・主原料：天然ゴム

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する天然ゴム製の手袋をいう。歯科用手袋を除く。

【使用方法等】

袋より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ・天然ゴムはかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
2. 重要な基本的注意
 - ・複数の患者には使用しないこと。
 - ・使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。
 - ・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透したりする場合があるので、確認の上、使用する。

使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・水ぬれに注意し、直射日光やオゾン、高温多湿を避けて保管する。
 - 包装開封後は、直射日光や強い人口光線を避け、蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺に保管しないこと。

2. 使用の期限
 - ・使用期限は包装に記載。
 - [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社グロックス
東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟25階
TEL 03-5859-5966

製造業者

Sri Trang Gloves(Thailand)Co.,Ltd
Sri Trang Gloves (Thailand)Co.,Ltd. Suratthani Branch.