

医療用品 3 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN コード 70976000

REIWA 検査・検診用PVCグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・左右同一型（平手タイプ）
- ・パウダーフリー
- ・未滅菌
- ・主原料：塩化ビニル樹脂（非フタル酸系可塑剤使用）
- ・表面仕上げ：平滑

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材性の手袋をいう。歯科用手袋を除く。

【使用方法等】

袋より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ・体質・使用状況によりかゆみ、かぶれ等の遅延性のアレルギー性症状（IV 型－遅延型：主に添加剤等の化学物質による）を引き起こすことがある。装着後数時間後から症状が 発現することがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
2. 重要な基本的注意
 - ・複数の患者には使用しないこと。
 - ・使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。
3. 相互作用
 - ・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透したりする場合があるので、確認の上、使用する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・水ぬれに注意し、直射日光やオゾン、高温、多湿を避けて保管する。
2. 使用の期限
 - ・使用期限は包装に記載。
[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社グロックス
東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟25階
TEL 03-5859-5966

製造業者

Zhonghong Pulin Medical Products.Co.,Ltd.（中国）
BLUE SAIL Medical Co.,Ltd.（中国）
INTCO Medical Technology Co., Ltd.（中国）

販売元

株式会社イメージワン
〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3
大崎ニューシティ3号館6F