

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDNコード:70976000)

REIWA 検査・検診用ニトリルグローブ

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

本品は合成ゴム(ニトリルゴム)を主材料とし、副材料に打粉を含まない(パウダーフリー)、未滅菌の使い捨て形式の検査・検診用手袋である。

表面仕上げは粗面と平滑がある。

【使用目的又は効果】

本品は手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意:

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止する。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。

2. 重要な基本的注意:

- 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
- 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので、確認し使用すること。

3. その他の注意:

使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。源、X線、高温多湿を避けて保管すること。
- 有効期間:製造年月より5年[自己認証による]
(使用期限は本品の包装に記載)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社グロックス

〒104-6025 東京都中央区晴海1-8-10

トリトンスクエア X 棟 25階

製造業者:

Zhonghong Pulin Medical Products Co.,Ltd. (中国)

Blue Sail Medical Co.,Ltd. (中国)

Shandong Intco Medical Products Co.,Ltd. (中国)

販売元: 株式会社イメージワン

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3

大崎ニューシティ3号館6F