

器 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ジーシー 研磨ブラシNO. 1 白羊毛

【形状・構造】

形状



[原材料]

マンドレール:真鍮（ニッケルメッキ）
ブラシ:白羊毛

【保管方法】

- ①水分・汚れが付着したまま保管しない。
- ②本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理する。

【有効期間】

○本品は使用有効期間等を特別定めていないが、長時間使用することにより、材料の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため、安全管理上新しい物と適時交換する。

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:株式会社クロダブラシ 荒川工場
住所 :〒116-0011
東京都荒川区西尾久 8 丁目 33 番 28 号

発売元 :株式会社ジーシー

住所 :〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 :お客様窓口 0120-416480

【使用目的又は効果】

補綴物などの研磨に用いる

【使用方法等】

歯科用ハンドピースに装着して使用します。
また、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①ブラシの植毛部から絶対に毛を抜き加工しないこと。
- ②ブラシのマンドレールを絶対に外さないこと。
- ③ブラシは長時間薬液消毒剤中に浸漬した場合、金属部が変色する事があるので注意すること。
- ④使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。
- ⑤研磨作業中は、必ず保護用防具眼鏡を使用すること。
- ⑥本品は 10, 000rpm 以下の回転数で使用する事。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある術者は、本品を使用しないこと。
また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ②本品は、目に入らないように注意すること。
万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。
 - ②ブラシを強アルカリ・強酸性洗浄清掃液中に浸漬すると、本品の軟性を損なうことがあるので、十分注意すること。
マンドレール・ワッシャー等は腐食することが予想されるので、十分注意すること。
ブラシは、加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器）を使用し、滅菌を行うとブラシの軟性を失い使用できなくなるので、十分注意すること。また、過酸化水素液剤を使用すると天然毛ブラシが脱色及び、変質するので、十分注意すること。
 - ③本品は軟組織（歯肉・粘膜）との接触により、損傷を与えることがあるため、注意を払って器具を十分にコントロールすること。
 - ④本品が歯科治療用ハンドピースに正確に装着されているか、確認して使用すること。必ず引っ張って見て確かめること。
 - ⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外は使用しないこと。
 - ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。