

器 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## ジーシー 研磨ブラシ・フェルト セット

### 【禁忌・禁止】

フェルトの再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

形状

研磨ブラシNO. 1

研磨ブラシNO. 2

研磨フェルト



[原材料]

マンドレール: 真鍮 (ニッケルメッキ)

ブラシ: 白羊毛

ブラシ: 軟質茶馬毛

フェルト: 羊毛 100%

### 【使用目的又は効果】

補綴物などの研磨に用いる

### 【使用方法等】

歯科用ハンドピースに装着して使用します。  
また、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①ブラシの植毛部から絶対に毛を抜き加工しないこと。
- ②ブラシのマンドレールを絶対に外さないこと。
- ③ブラシは長時間薬液消毒剤中に浸漬した場合、金属部が変色する事があるので注意すること。
- ④使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。
- ⑤研磨作業中は必ず保護用防具眼鏡を使用すること。
- ⑥本品は、10,000rpm以下の回転数で使用すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意 (次の患者には慎重に適用すること)
  - ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。  
また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
  - ②本品は、目に入らないように注意すること。  
万一目に入ったときは、すぐに多量の流水を洗浄し、眼医の診断を受けること。
- 2) 重要な基本的注意
  - ①研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。
  - ②ブラシ及びフェルトを強アルカリ・強酸性洗浄清掃液中に浸漬すると本品の軟性を損なうことがあるので十分注意すること。マンドレール・ワッシャー等は腐食することが予想されるので、十分注意すること。  
ブラシは、加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器)を使用し、滅菌を行うと、ブラシの軟性を失い使用できなくなるので、十分注意すること。また、過酸化水素液剤の使用により天然毛ブラシが脱色及び変質するので十分注意すること。

- ③本品は軟組織(歯肉・粘膜)との接触により、損傷を与えることがあるため、注意を払って器具を十分にコントロールすること。
- ④本品が歯科治療用ハンドピースに正確に装着されているか確認して使用すること。必ず引っ張って見て確かめること。
- ⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外は使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法】

- ①水分・汚れが付着したまま保管しない。
- ②本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理する。

### 【有効期間】

- 本品は使用有効期間等を特別定めていないが、長時間使用することにより、材料の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため、安全管理上新しい物と適時交換する。

### 【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: 株式会社クロダブラシ 荒川工場  
住所: 〒116-0011  
東京都荒川区西尾久8丁目33番28号

発売元: 株式会社ジーシー

住所: 〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号: お客様窓口 0120-416480