

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

デンチャーポリッシャー HP

【形状・構造及び原理等】

① [構造]



② [原材料] 不織布表面処理材

【使用目的又は効果】

[使用目的]

- 補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】

- ① 歯科技工用ハンドピースに装着して使用する。
なお、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用すること。

【使用上の注意】

1. [使用方法に関連する使用上の注意]

- ① 本品は歯科技工用ハンドピースに装着して使用する研磨ホイールです。口腔内研磨には使用しないこと。
- ② マンドレルが付いていない場合は、手持ちのマンドレルをご使用ください。また、本品が研磨中に楕円回転を起こさない様に、ワッシャー中心部でマンドレルを確実に合せ装着してください。
- ※ 必ず引っ張ってみて確かめてください。**
- ③ 本品を使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。
- ④ 研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡を使用すること。
- ⑤ 本品が研磨作業中に歯科技工用ハンドピースから外れない様に装着すること。
- ⑥ 本品の使用回転数は、 $15,000\text{min}^{-1}$ (rpm) 以下で使用する。
- ⑦ 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。
- ⑧ **パフホイール用洗浄清掃液中に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがありますので十分注意すること。また、マンドレル・ワッシャー等が腐食することが予想されますので、十分注意すること。**
- ⑨ 本品は、使用目的の用途記載以外は使用しないこと。
- ⑩ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. [基本的使用注意]

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと
- ② 使用前に必ず(保守・点検に係る事項)を参照すること。
- ③ 使用目的以外は使用しないこと。
また、破損・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ② 本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理をすること。

[有効期間]

- 本品は使用有効期間等を特別定めていないが、長時間使用することにより、材料の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事が有るため、安全管理上新しい物と適時交換する。

【保守・点検に係る事項】

[使用前・使用後の点検]

- 使用(滅菌)前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社クロダブラシ
電話番号： 03-6458-2561

発売元： 株式会社クロダブラシ
住所： 〒136-0071
東京都江東区亀戸1-18-11
<http://www.kuroda-brush.co.jp/>
電話番号： 03-3684-4921

取扱説明書等を必ずご参照ください。