

機械器具 15 舌圧子  
一般医療機器 舌圧子 JMDNコード14066000  
タングシールド

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

舌を移動させて周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる。

本器の原材料及び構造は下記のとおり。

材 質 サーマプラスチックポリウレタン

構 造 ポリウレタン成型品  
形状及びサイズ等はカタログに記載のとおり。

【使用目的、効能又は効果】

舌を移動させて周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 患者に合わせて適切なサイズを選んで使用して下さい。
- 2) 万一、患者が痛みを感じたり、炎症が続く場合は使用を中止して下さい。

【使用上の注意】

- 1) 本器は再使用しないこと。
- 2) 本器の使用は必ず歯科医師の指示に従って行うこと。
- 3) 本器の洗浄には家庭用洗剤は使用しないこと。
- 4) 本器の使用時、患者にアレルギー症状が出た場合、又患者が痛みを感じたり、炎症が続く場合はただちに使用を中止して下さい。
- 5) 万一、器具に劣化や異常が見られた場合、又、本器の使用時、患者にアレルギー症状が出た場合はただちに使用を中止すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

結露しない場所にて、常温・常湿にて保管する。  
また、保管する時には以下の点に注意して保管すること。

- 1) ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【取扱上の注意】

- 1) 製品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- 2) 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- 3) 器具の形態変更や改造等はしないこと。
- 4) 劣化や異常が見られた場合には、器具の使用を直ちに中止すること。

【包 装】

1パック3個入り、又は20個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者の名称及び住所等〕

製造販売業者名： ケイティティ株式会社  
住 所： 東京都中央区日本橋人形町2-7-15  
日本橋トグチビル  
電話番号： 03(5614)6222  
FAX番号： 03(5614)6188  
緊急連絡先： 同 上

〔外国製造業者の名称及び製造国〕

オーソ オーガナイザーズ社 アメリカ合衆国  
ORTHO ORGANIZERS, INC.

当該添付文書は製品のラベルのコードを読み込むことでPMDAのHPからご確認いただけます。