

機械器具 6 6 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDNコード70682000
ミキシングボウル

【形状・構造及び原理等】

歯科材料を練和又は混和する器具。

本器の原材料及び構造は下記のとおり。

材 質 シリコン及びポリウレタン
構 造 シリコン成型品及びポリウレタン成型品
個々の形状とサイズ等はカタログに記載のとおり。

【使用目的、効能又は効果】

歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和する。

【操作方法又は使用方法等】

- 1) ボウルにアルギネート（アルギン酸）や印象材など練和する歯科材料を入れます。
- 2) 練和する歯科材料の指示に従い、すばやく練和して、下さい。

【使用上の注意】

- 1) 家庭用洗剤は使用しないこと。
- 2) *洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。
*薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
- 3) 洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

結露しない場所にて、常温・常湿にて保管する。
また、保管する時には以下の点に注意して保管すること。

- 1) ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【取扱上の注意】

- 1) 製品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- 2) 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- 3) 器具の形態変更や改造等はしないこと。
- 4) 劣化や異常が見られた場合には、器具の使用を直ちに中止すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：使用前・使用後は、破損、ヒビ、キズ等がないか、確認すること。

【包 装】

1パック1個入り、又は3個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者の名称及び住所等]

製造販売業者名： ケイティティ株式会社
住 所： 東京都中央区日本橋人形町2-7-15
日本橋トグチビル
電話番号： 03(5614)6222
FAX番号： 03(5614)6188
緊急連絡先： 同上

[外国製造業者の名称及び製造国]

デントウラム社 ドイツ国
Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG.

当該添付文書は製品のラベルのコードを読み込むことでPMDAのHPからご確認いただけます。