


バイタルナビ 大型アネロイド血圧計 No. 542 NAVIS

【禁忌・禁止】

- ・天然ゴムアレルギーの方は使用しないこと。
- ・接続チューブ間にルアーロックコネクタを使用しないこと。
(輸液チューブ等に誤接続された場合、加圧用空気が送気される可能性がある。)

＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

大型アネロイド血圧計は、下記の部分から構成されております。

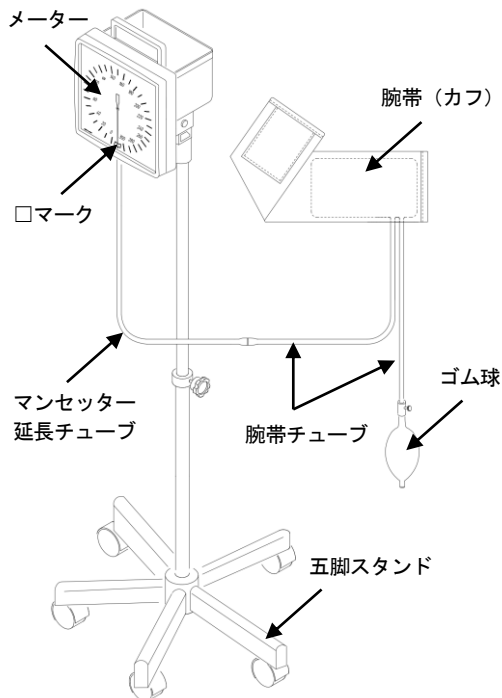

腕帯のチューブ(右側)にゴム球を、メーターにマンセッター延長チューブを取付けた後、腕帯のチューブ(左側)とマンセッター延長チューブを取付ける。

各部	原材料
メーター	ABS樹脂
マンセッター延長チューブ	ラテックス
腕帯チューブ	PVC
腕帯	ナイロン
ゴム球	PVC／真鍮

(原理)

上腕に巻き付けた腕帯に空気を入れ、空気を抜きながら聴診法により、血圧を測定します。

【使用目的又は効果】

- ・別途用意の聴診器により、血管音(コロトコフ音)を聴取し、最高血圧値と最低血圧値を読み取り、血圧を測定します。
- 測定範囲: 20～300mmHg

【使用方法等】

- ・血圧の測定はアネロイド血圧計と聴診器の併用で行なわれます。
- ・メーターの取付けに関しては組立説明書を必ずご参照ください。
- ・腕帯を患者の腕に巻き、排気バルブを締め、ゴム球により加圧し、メーターの指針を予想最高血圧値より少し高めにし、排気バルブを緩めて血管音の聴こえ始めた時点と聴こえ終わった時点により最高血圧値及び最低血圧値を測定します。
- ・予想最高血圧値より除々に指針を下げ、規則的な血管音が聴こえ始めたときの指針の指示値が最高血圧値です。
- ・さらに指針が下がるにつれて血管音が最後に聴こえた時点の指針の指示値が最低血圧値です。

【使用上の注意】

- ・血圧測定のための、患者への長時間の加圧は避けてください。
- ・腕帯及びチューブ、ゴム球に空気漏れがないか確認してください。
- ・使用しない時は、腕帯内の空気を抜いてください。
- ・腕帯をあまり小さく畳んだり、チューブを折り曲げたままにしないでください。
- ・メーターに落下などの衝撃を加えないでください。
- ・本体内部に薬剤やその他の液体及びほこり等、異物が入らないように留意してください。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・保管場所: 急激な温度変化のある所、極端に高温や低温になる所、衝撃・振動を受ける所、化学薬品の保管場所やガスの発生する所は避けてください。

(耐用年数)

- ・メーターのみ5年(当社データによる)
- ※正規の定期点検を実施した場合

＊ ＊ 【保守・点検に係る事項】

(保守)

- ・メーターが汚れた時は、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤をつけた布で汚れを落とした後、からぶきしてください。
- ・ウォッシュブルカフは別添の説明書に従って清掃してください。

(点検)

- ・メーターの指針が□マークの位置にある事を確認してください。
- ・定期的に点検を行い、精度を維持してください。
- ・ゴム球は定期的に交換してください。
(長期使用により、劣化で亀裂やベトツキ等が発生する為)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者及び製造業者)

ケンツメディコ株式会社
TEL 0495-71-1001

(販売業者)

アズワン株式会社
TEL 0120-711-875