

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ（JMDN:35531000）

## 滅菌済み手術用不織布製品

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### \*\*【形状・構造及び原理等】

・本品は不織布製のドレープ（原材料：ポリエステル/セルロース/レーヨン/ポリエチレン/ポリプロピレン）であり、補強バー/インサイズ/パウチ/補強部/コードホルダー/ホースジョイントコネクタ（ホースを含むことがある）/フォームブルー（可鍛性ワイヤ）を付属して使用されることもあります。また、補強部分のみ防水性、それ以外の部分は撥水性素材、又は全面吸収防水性の素材があります。

#### \*\*【使用目的又は効果】

- ・手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具です。また、本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用します。
- ・本品は単品のまま、単品同士あるいは医療用雑貨（雑品）等を組み合わせてパックにして流通することがあります。
- ・本品は単回使用です。

#### \*\*【使用方法等】

1. 使用目的にあったドレープを選択し、無菌操作で包装から取り出します。
2. 患者に掛けます。
3. 使用後は、施設の基準に従って廃棄して下さい。

#### 【使用上の注意】

（使用注意）

1. 粘着テープを使用している材料の粘着剤による発赤や、浸出液の貯留による侵軟を起こしたり、皮膚剥離を起こす場合があります。このような症状を起こしたとき本品の関与が否定できない異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を施して下さい。

（重要な基本的注意）

1. 本品の再滅菌はしないで下さい。
2. このパッケージの内容物は、火や高温に近づけると燃えることがあります。ドレープはその目的からバリアの機能を有するので、患者に塗布したアルコールが気化し内部にこもることで引火しやすくなる場合があります。
3. 撥水性素材である部分は、水分量あるいは衝撃によって溶液又は血液が素材を通り抜ける場合があります。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気を避けて保管して下さい。

##### 2. 使用期限

使用期限は、インサートラベル等に記載しています。

\*\*[自己認証（自社データ）による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

（製造販売元）

ケーアイ株式会社

\*愛媛県西条市朔日市 833-3

電話番号：(0897) 47-6085

#### 【販売業者】

バイリーンクリエイト株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地五丁目6番4号

電話番号：(03) 4546-1183

※製品に対するお問い合わせはバイリーンクリエイト株式会社までお願いいたします。