

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ(JMDN:35531000)

滅菌済み手術用不織布製品

再使用禁止

禁忌・禁止

- ・本品は一回限り使用のディスポーザブル品です。再使用、再滅菌はしないでください。


形状・構造及び原理等

本品は、外科領域において使用する単回使用汎用サージカルドレープを主体に包装およびE.O.G滅菌した製品です。

本品は各種の領域に対応した内容物で構成されています。

構成内容の詳細は製品ラベルをご参照ください。

滅菌袋正面図

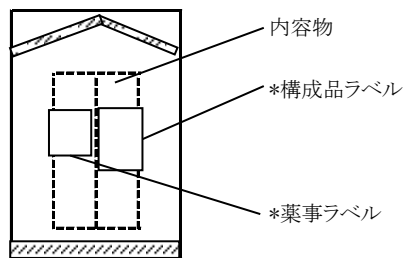

成分

不織布基材：ポリプロピレン

使用目的又は効果

使用目的

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布の用具です。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用します。本品は単回使用です。

使用方法等

使用方法

- 1.包装を丁寧に開封し、製品を取り出します。
- 2.術野を、病院または医師の処方により消毒します。
- 3.消毒した皮膚を十分に乾かします。
- 4.粘着材使用の製品の場合、適用に先立ち剥離紙を剥がします。
- 5.それぞれの製品を適切な位置に貼付または固定して展開します。

使用上の注意

重要な基本的注意

- ・本品は手技に精通した術者が使用してください。
- ・本品は滅菌済みですので、開封は使用直前に行ってください。
- ・ご使用前に*構成ラベルを点検し、処置を行う上で不足している構成があれば、あらかじめ準備してください。

- ・包装に破損、その他の異常が認められた場合には使用しないでください。
- ・*薬事ラベルに明示されている使用期限内であることを確認した上でご使用ください。
- ・滅菌袋の破損を防ぐために、製品は丁寧に扱ってください。
- ・本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー性症状を起こした場合には、ただちに本品の使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- ・開封後、使用しなかった構成は廃棄し、再利用しないでください。
- ・皮膚より粘着材を剥がす際、皮膚表面角質層の機械的損傷を防ぐために、皮膚の粘着部位を指で押さえながら、ゆっくりと剥がしてください。
- ・高温を発する機器類に接しないように注意してください。

保管方法及び有効期間等

保管

水漏れに注意し、直射日光・高温多湿を避けて保管してください。

使用期限

使用期限は*薬事ラベルに記載されています。

[自己認証(当社データ)による]

保守・点検に係る事項

廃棄

使用後は医療廃棄物として廃棄してください。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

*製造販売業者 ケーアイ株式会社

〒793-0027 愛媛県西条市朔日市833-3

TEL(0897)47-6085 FAX(0897)47-6086

販売業者

日本光電 日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合1-31-4

TEL(03)5996-8000(代表) FAX(03)5996-8091