

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDNコード:35531000

インサイズドレープ

再使用禁止

【警告】

1. 可燃性の消毒薬を使用する場合は、消毒後アルコール等を完全に拭き取り、または完全に気化拡散させてから本品を使用すること。
[電気メスペンシル等を使用の際、気化したアルコール蒸気の濃度によっては引火する恐れがあるため]
2. 光源装置や手術用照明器を使用する際は、一時的に取り外した光源コードの先端を本品の上に直接置かないこと。
[光源の熱によって本品が焦げたり、溶けたりして患者に熱傷を生じさせる恐れがあるため]
3. 電気メスペンシル等の先端部を本品の上に直接置かないこと。
[電気メスペンシル等の先端部の熱によって本品が焦げたり、溶けたりして患者に熱傷を生じさせる恐れがあるため]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. プラスチックドレープを介して除細動を掛けないこと。
[分流がおきたり、除細動の効果が不十分になったりする恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリウレタンフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した切開用ドレープで、1枚ずつ滅菌包装されている。

【使用目的又は効果】

本品は、手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。

【使用方法等】


1. ご使用前の準備
 - 1) 術野を各施設または医師の処方により消毒してください。
 - 2) 自然乾燥または滅菌ガーゼ等で拭き取る等し、消毒した皮膚を十分に乾かしてください。
2. 貼付
以下の図を参考に、貼付を行ってください。




1) 本品を滅菌包装から取り出し、て展開し、包装用グラシン紙を取り外してください。



2) 本品の両端を掴んで展開し、たるませて位置決めを行ってください。

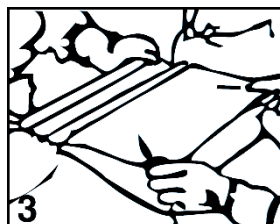

3) 一人が本品の端を持ち、もう一人が剥離紙を剥がしながら貼り広げてください。

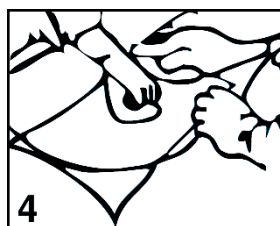

4) 粘着フィルムの中央部から周辺部へ向かってシワを作らないように押し付けながら、貼り広げてください。このとき粘着フィルムを引っ張らないよう注意してください。

5) 粘着フィルムを皮膚に貼付けたあと全ての剥離紙を剥がし、ドレープに固定してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

本品の使用によりかぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー性症状を引き起こした場合には、ただちに本品の使用を中止し、適切な処置を施してください。

〈高齢者への適用〉

高齢の患者等で皮膚が脆弱な場合、粘着剤使用製品の貼付時・剥離時には、特段の配慮が必要です。特に皮膚に緊張をかけて貼らないようにしてください。皮膚がひっぱられて炎症を起こすことがあります。

〈その他の注意〉

1. 本品の再滅菌はしないでください。
2. 本品を使用後、患者から粘着剤付きドレープを患者から除去する際は、粘着部を180°折り返すような方向へゆっくりと剥がしてください。また、剥がす際には押さええている手をこまめに粘着境界部に移動し、皮膚に緊張をかけないように配慮してください。
3. 本品を縫合糸、ステープル等の創傷閉鎖材の代用として使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室内で保管してください。

〈有効期間または使用期限〉

使用期限をラベルに記載しています。

〔自己認証(製造元データ)による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

ケーアイ株式会社

〒793-0027 愛媛県西条市朔日市 833-3

TEL:(0897)47-6085

〈外国製造業者〉

Hony Medical Co., Ltd.

国名:中華人民共和国