

医療機器届出番号：28B2X00017101000

注文による規格外寸法製品の製作も可能です。

- 医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
 [臥位になることで静脈還流等に変化が起り、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。]

- 1) 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。]
- 2) 感染性静脈炎の患者。
[菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。]
- 3) 装着部位に極度の変形を有する患者。
[適切な圧迫圧が得られないため。]

本品の形状（種類）、規格・寸法、材質については以下の通りです。

1. 形状（種類）と規格・寸法

形状 (種類)

ハイソックス	ストッキング	片脚ストッキング	片脚バンテリストッキング	バンテリストッキング
				

規格・寸法 (サイズ/Ⅰ～Ⅶ、各サイズスタンダードとエクストラワイドがある。
丈についてはレギュラー、ショートとエクストラショートがある。)

周径									
	スタンダード				エクストラワイド				共通
サイズ	股下周	大腿周	膝下周	ふくらはぎ周	股下周	大腿周	膝下周	ふくらはぎ周	足首周
I	43-48	39-43	28-30	29-33	43-55	39-49	28-34	29-35	18-20
II	45-51	41-46	30-34	31-35	45-59	41-52	30-36	31-37	20-22
III	49-55	44-49	32-36	33-37	49-63	44-55	32-38	33-39	22-24
IV	53-59	47-52	34-38	35-39	53-66	47-58	34-41	35-42	24-26
V	57-63	50-55	36-41	37-42	57-69	50-61	36-43	37-45	26-28
VI	61-66	53-58	38-43	39-45	61-72	53-64	38-45	39-47	28-30
VII	64-69	56-61	40-45	41-48	64-75	56-67	40-49	41-52	30-32

レギュラー丈				ショート丈			
膝下丈	股下丈	パンティストッキング	足	膝下	膝下	パンティストッキング	足
38-43	68-80	76-85	24.5-28.5	33-37	57-67	65-75	24.5まで
*エクストラショート丈							
膝下丈	股下丈	パンティストッキング	足				
28-32	46-56	54-64	24.5まで				

圧迫圧クラス	圧迫圧
クラス1	18-21 mmHg
クラス2	23-32 mmHg
クラス3	34-46 mmHg

2. 材質

クラス1： ナイロン46%、ポリウレタン54%、
 クラス2、および 3： ナイロン42%、ポリウレタン58%、

3. 構造

本品は、弾性素材を使用したストッキングで、弾性素材の持つ伸縮性と脚部形状を考慮した各部位への圧迫圧を下肢末端から中枢へと段階的に変化させる構造。

4. 原理

本品を装着することにより、下肢から中枢へ段階的な漸減圧をかけ、静脈血、リンパ液の下肢から中枢への循環を促すこと。

****[使用目的又は効果]**

下肢の末端から中枢へと漸減的に圧迫を加えることにより、静脈血やリンパ液のうっ滞を予防又は軽減する。

★★[使用方法等]

1. 製品の選択

- 1) 症状に適合した圧迫圧の形状、規格製品を選択すること。
- 2) 脚の指定部位の周径を測定し、適正なサイズを選択すること。

2. 装着方法

- 1) ストッキングのつま先からかかとの部分を除いて、ストッキングを裏返しにする。丸めるとより作業が容易になる。
- 2) 足のかかとの部分まで引いて装着する。
- 3) かかどから脚上部へは、注意しながら少しづつ引き上げていく。
- 4) ストッキング先端を引くのではなく、手のひらを使用しなるべく均等に引き上げること。
- 5) ストッキングを引き上げる作業は背中を下に横になって、装着する脚を上にあげながら行うのも良い。
- 6) 装着後、装着した脚を1分ほど足首から股下にに向けて手のひらで擦り上げることで循環を促すこと。

〔使用上の注意〕

装着部位に、創傷、湿疹、かぶれなどがある場合は使用しないこと。
 本品の使用により、装着部位疼痛、しびれ、かゆみや皮膚温の低下など装着後の不快感がある場合は使用を中止すること。
 本品の装着前に各計測箇所を計測し、規格に適したものを選択すること。装着後、症状の変化により計測値に変化がある時は、適正なものを装着すること。

※※「保管方法及び有効期間等」

1. 貯藏・保管方法

高温、多湿、直射日光を避け、室温で保管してください。

2. 使用の期限

装着時間、方法などにより違いがあるが、6ヵ月とする。(当社データによる)

「保守点検に係る事項」

洗濯は、中性洗剤を使用し手洗いし陰干しすること。長時間洗剤に浸す必要はありません。漂白剤、柔軟剤の使用や温水での洗濯はしないこと。ドライクリーニング、アイロン、乾燥機の使用は避けてください。

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等]

製造販売業者の名称: ケン・メディカル株式会社
 外国製造所国名: ドイツ
 外国製造業者の名称: Heinz Schiebler Norddeutsche Gummistrmpffabrik
 GmbH & Co. KG

製品に関するお問い合わせ：
株式会社日本リンパ浮腫サポートセンター
電話番号 072-808-7531