

医療機器届出番号：28B2X00017102000

[敬告]

- 1) 動脈血行障害、うつ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者。〔王迫により症状が悪化するおそれがあるため。〕
- 2) 装着部位に神経障害のある患者。
〔血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため。〕
- 3) 糖尿病患者。
〔無症状の神経障害や血行障害を併発している可能性があり、痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。〕
- 4) 繊維状に対して過敏症のある患者。
〔接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。〕

医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
 「臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧が加わるおそれがあるため。」

圧迫圧クラス	圧迫圧
クラス1	18-21 mmHg
クラス2	23-32 mmHg

コットン48%、ポリウレタン30%、ナイロン22%

本品は、弾性素材を使用したストッキングで、弾性素材の持つ伸縮性と脚部形状を考慮した各部位への圧迫圧を下肢末端から中枢へと段階的に変化させる構造

本品を装着することにより、下肢から中枢へ段階的な漸減圧をかけ、静脈血、リンパ液の下肢から中枢への循環を促すこと。

「使用目的、効能又は効果」

下肢の末端から中枢へと漸減的に圧迫を加えることにより、静脈血やリンパ液のうっ滞を予防又は軽減する。

1. 製品の選択

- 2) 足の指定部位の周径を測定し、適正なサイズを選択すること。

- 1) ストッキングのつま先からかかとの部分を除いて、ストッキングを裏返しにする。丸めるとより作業が容易になる。
- 2) 足のかかとの部分まで引いて装着する。
- 3) かかとのから脚上部へは、注意しながら少しづつ引き上げていく。
- 4) ストッキング先端を
- 5) 引くのではなく、手のひらを使用しなるべく均等に引き上げること。
- 6) ストッキングを引き上げる作業は背中を下に横になって、装着する脚を上にあげながら行っても良い。
- 7) 装着後、装着した脚を1分ほど足首から股下に向けて手のひらで擦り上げることで循環を促すこと。

「使用上の注意」

装着部に、創傷、湿疹、かぶれなどがある場合は使用しないこと。
 本品の使用により、装着部が疼痛、しびれ、かゆみや皮膚温の低下など装着後の不快感がある場合は使用を中止すること。
 本品の装着前に各計測箇所を計測し、規格に適したものを選択すること。装着後、症状の変化により計測値に変化がある時は、適正なものを装着すること。

****「保管方法及使用期間等」**

1. 貯藏・保管方法

高温、多湿、直射日光を避け、室温で保管してください。

4. 使用の期限

装着時間、方法などにより違いがあるが、6ヵ月とする。(当社データによる)

「保守点検に係る事項」

洗濯は、中性洗剤を使用し手洗いし陰干しすること。長時間洗剤に浸す必要はありません。漂白剤、柔軟剤の使用や温水での洗濯はしないこと。ドライクリーニング、アイロン、乾燥機の使用は避けてください。

「製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等」

製造販売業者の名称：ケン・メディカル株式会社

外国製造所国名：ドイツ

外国製造業者の名称: Heinz Schiebler Norddeutsche Gummi Strmpffabrik
GmbH & Co. KG

製品に関するお問い合わせ：

株式会社日本リンパ浮腫サポートセンター

電話番号 072-808-7531

**[形状・構造及び原理等]

本品の形状（種類）、規格・寸法、材質については以下の通りです。

1. 形状（種類）と規格・寸法

形状 (種類)

ハイソックス	ストッキング	片腿ストッキング	片腿バンテイスツッキング	バンテイスツッキング
				

規格・寸法(サイズ/Ⅰ～Ⅶ、各サイズスタンダードとエクストラワイドがある。
丈についてはレギュラー、ショート及び エクストラショートがある。)

周径									
	スタンダード				エクストラワイド				共通
サイズ	股下周	大腿周	膝下周	ふくらはぎ周	股下周	大腿周	膝下周	ふくらはぎ周	足首周
I	43-48	39-43	28-30	29-33	43-55	39-49	28-34	29-35	18-20
II	45-51	41-46	30-34	31-35	45-59	41-52	30-36	31-37	20-22
III	49-55	44-49	32-36	33-37	49-63	44-55	32-38	33-39	22-24
IV	53-59	47-52	34-38	35-39	53-66	47-58	34-41	35-42	24-26
V	57-63	50-55	36-41	37-42	57-69	50-61	36-43	37-45	26-28
VI	61-66	53-58	38-43	39-45	61-72	53-64	38-45	39-47	28-30
VII	64-69	56-61	40-45	41-48	64-75	56-67	40-49	41-52	30-32

レギュラー丈				ショート丈			
膝下丈	股下丈	パンティ ストッキング	足	膝下丈	膝下丈	パンティ ストッキング	足
38-43	68-80	76-85	24.5-28.5	33-37	57-67	65-75	24.5まで
*エクストラショート丈							
膝下丈	股下丈	パンティ ストッキング	足				
28-32	46-56	54-64	24.5まで				

注文による規格外寸法製品の製作も可能です。