

脊椎用器械(汎用)KI (RR0001-059)





【禁忌・禁止】


- ・ 目的以外の使用はしないこと。[相互作用の項参照]
- ・ 本品に曲げ、研磨切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)は絶対に行わないこと。[破損の原因になる恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

(1)形状及び構造

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示ラベルまたは本体の刻印を確認すること。

No.	製品名	JANコード	製品番号
1	No.1-ダイレーター	4582433350892	SPN-DI0011
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	
No.	製品名	JANコード	製品番号
2	No.2-ダイレーター	4582433350908	SPN-DI0012
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	
No.	製品名	JANコード	製品番号
3	No.3-ダイレーター	4582433350915	SPN-DI0013
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	
No.	製品名	JANコード	製品番号
4	No.4-ダイレーター	4582433350922	SPN-DI0014
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
5	t1.3 レトラクター	4582433350939	SPN-RE005
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
6	30° プッシャー	4582433350946	SPN-CP00230
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼 樹脂製品 : ポリアセタール	

No.	製品名	JANコード	製品番号
7	45° プッシャー	4582433350953	SPN-CP00245
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼 樹脂製品 : ポリアセタール	

No.	製品名	JANコード	製品番号
8	ラウンド スクレーパー 6.6	4582433350960	SPN-SC001
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼 樹脂製品 : ポリアセタール	

No.	製品名	JANコード	製品番号
9	キュレット 6.5	4582433350977	SPN-CU001
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼 樹脂製品 : ポリアセタール	

No.	製品名	JANコード	製品番号
10	骨切除ガイド	4582433352506	SPN-GU003
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	


No.	製品名	JANコード	製品番号
15	No.2-ダイレーター S	4582433369795	SPN-DI0012S
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
11	レトラクター	4582433352513	SPN-RT006
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
16	No.1-ダイレーター S	4582433369801	SPN-DI0011S
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
12	ラウンド スクレーパー L	4582433354845	SPN-SC002
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼 樹脂製品 : ポリアセタール	

No.	製品名	JANコード	製品番号
17	No.2-ダイレーター S プッシャー	4582433369818	SPN-DI0012SP
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
13	ナーブ レトラクター	4582433354838	SPN-RT007
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
18	No.2-ダイレーター RK	4582433371019	SPN-DI0012RK
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	


No.	製品名	JANコード	製品番号
14	No.2-ダイレーター プッシャー	4582433361928	SPN-DI0012P
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

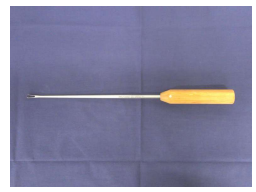
No.	製品名	JANコード	製品番号
19	No.1-ダイレーター RK	4582433371026	SPN-DI0011RK
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
20	No.2-ダイレーター RK プッシャー	4582433371033	SPN-DI0012RKP
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	


No.	製品名	JANコード	製品番号
25	ラウンドスクレーパー SE	4582433374539	RKC-SC003
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼 樹脂製品 : ポリフェニル サルフォン	

No.	製品名	JANコード	製品番号
21	ナーブレトラクター RK	4582433371040	SPN-RT007RK
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
26	ボーンファンネル	4582433374546	RKC-BF012
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
**22	RKC キュレット	4582433372573	RKC-CU0027
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼 樹脂製品 : ベークライト	

No.	製品名	JANコード	製品番号
27	ロッドブランジャー	4582433374553	RKC-RP012
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
23	グラフティング プレート	4582433372511	RKC-GP006
製品外観		材質	
		樹脂製品 : ポリプロピレン	


No.	製品名	JANコード	製品番号
28	グラフティング プレート T	4582433375598	RKC-GP007
製品外観		材質	
		樹脂製品 : ポリプロピレン	

No.	製品名	JANコード	製品番号
24-1	ボーンインパクター 30	4582433372856	RKC-IP00230
24-2	ボーンインパクター 35	4582433372863	RKC-IP00235
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼 樹脂製品 : ポリアセタール	

No.	製品名	JANコード	製品番号
29	PETLIF partial oval sleeve	4589852109599	RKC-SL003V
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
30	PETLIF partial oval dilator	4589852109605	RKC-DI0011V
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
35	11-9・ペンシルダイレーター	4589852120495	RKC-DI1009P
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
31	7.5・4・ナープレートラクター	4589852118843	RKC-RT7540
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
36	13-7・ペンシルダイレーター	4589852120501	RKC-DI1307P
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
32	W12・ナープレートラクター	4589852120464	RKC-RT012
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
37*	13-7・スリーブP	4589852122413	RKC-SL1307P
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

No.	製品名	JANコード	製品番号
33	13-7・スリーブ	4589852120471	RKC-SL1307
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

(2)原理

本品は脊椎固定術等の脊椎手術に用いる手術器械をいう。手動式のものに限る。本品は再使用可能である。

【使用目的又は効果】

脊椎用インプラントの挿入・固定又は抜去等の脊椎固定術に使用される手術器械である。

【使用方法等】

(1)使用方法

本品を使用して適切なサイズの脊椎固定用インプラントを物理的な処置により設置する。

(2)使用方法等に関連する使用上の注意

本品は未滅菌の状態で供給される為、使用前に滅菌すること。滅菌は【保守・点検に係る事項】の(2)滅菌により行うこと。

【使用上の注意】

** (1) 重要な基本的注意

- ・ 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ・ 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者または貸与業者に連絡すること。
- ・ 本品の使用に際し、手術手技を十分に理解すること。
- ・ 使用前に、破損・変形・傷・摩耗が無いか、適切に機能するか確認すること。破損等が確認された場合は使用せずに修理を依頼すること。
- ・ 機器同士を過度な力で接触させないこと。[機器の破損や摩耗のおそれがある]

No.	製品名	JANコード	製品番号
34	10-8・ペンシルダイレーター	4589852120488	RKC-DI1008P
製品外観		材質	
		金属製品 : ステンレス鋼	

- ・使用後は、ただちに破損・折損がなかったか点検すること。破損等が見つかった場合、破片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は適切な処置を行うこと。

(2) 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

[併用禁忌] (使用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が認めていない他社製品	専用品でないと適合しない恐れがあり、目的の効果が得られない	当社指定の製品以外との併用を検証していない

(3) 不具合・有害事象

① 重大な不具合

- ・本品の破損、折損、摩耗、変形
- ・本品の機能不良

② 重大な有害事象

- ・血管、神経、組織、靭帯、腱、骨、内臓又は関節の損傷及び穿孔、出血、骨折又は神経障害等
- ・感染症
- ・破損片の体内遺残
- ・アレルギー反応
- ・本品の不具合によって起こる手術時間の延長、手技の変更及び再手術

③ その他の有害事象

- ・患者及び手術従事者の負傷

(4) 高齢者への適用

高齢者は、骨が粗鬆症化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後、緩み等が起きる可能性があるため、慎重に使用すること。

(5) 妊婦・産婦・授乳婦及び小児への適応

妊婦・産婦・授乳婦等に対しては、特に治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避けて、室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

(1) 洗浄

- ・器械の使用後は付着した組織片の乾燥を防ぐため、使用直後は速やかにすすぎ洗いを行い、血液、組織片及び生理食塩水を除去すること。使用直後に行えない場合は、洗浄するまで器械を浸漬しておくこと。
- ・洗浄装置（超音波洗浄機等）を用いる場合は、血液・タンパク質に対し優れた溶解特性を持つ洗剤を用いること。洗浄液は使用の都度新たに調整すること。
- ・汚染物除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- ・強アルカリ／強酸性洗剤及び消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。洗浄には柔らかいブラシ等を使用し、金属性タワシ・クレンザー（磨き粉）は器具の表面が損傷するので汚染除去及び洗浄に使用しないこと。
- ・洗浄後は腐食防止のため、直ちに乾燥すること。

(2) 滅菌

- ・湿熱滅菌の滅菌方法の一例を以下に示す。（ISO17665-2 参照）

温度(℃)	時間(min)
121	15
126	10
134	3

- ・上記条件は滅菌後の製品の無菌性を保証するものではなく参考値である。
- ・湿熱滅菌の滅菌条件、方法については滅菌器製造業者取扱説明書の指示に従うこと。

- ・滅菌後の製品における無菌性の保証については各医療機関の責任の下行うこと。

(3) 点検

- ・本品に傷・割れ・有害なまくれ・さび・ひび割れなどの損傷、摩滅が無いことを外観検査によって確認すること。
- ・各部品やそれらを固定しているネジやピンの外れや緩みがないこと。
- ・対応する手術器械やインプラントと正しく組み合わせることが出来ること。
- ・操作部及び可動部が正しく動作及び機能していること。
- ・レーザーマーキング等の表示が判読可能であること。
- ・器械は特定の時点で摩滅し、交換が必要になるので注意すること。
- ・使用後は、分解可能な器械は分解し、損傷が無いか検査すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 K S I
電話番号 0550-88-3660