

13B3X10073-001-04
2009 年 1 月 7 日作成
2013 年 5 月 16 日改訂
2015 年 8 月 1 日改訂
2018 年 9 月 21 日改訂
2020 年 11 月 7 日改訂

*製造販売届出番号 13B3X10073000001

理学診療用器具 器 12 理学療法用器械器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000


ソフトフィットロング

【禁忌・禁止】

【形状・構造及び原理等】

下腹部圧迫用パンツ

製品例:

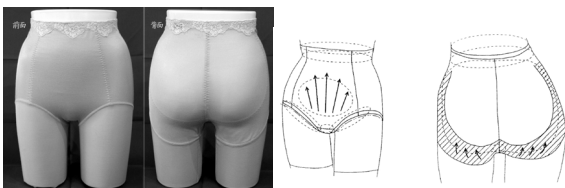

*【使用目的、効能または効果】

リンパ液のうっ滞を軽減または予防するために、ソケイ部から下腹部にかけて段階的に圧迫を加え、リンパ液の流れを良好にする。

*【品目仕様等】

- ・針の残存(破損針を含む)がないこと
- ・糸のほつれがないこと
- ・糸ヨレがないこと

【操作方法又は使用方法等】

- ・通常の女性用肌着と同様に使用する。
- ・サイズの合ったものを使用する。
- ・他の弾性ストッキングと併用できる。
- ・圧迫力強化のためには別売の補助パットまたはワンタッチサポーターと併用する。

【使用上の注意】

- ・使用に際しては医師の判断を仰ぐ。
- ・着用していてもしびれや痛みが生じた場合、うっ血や下肢の発疹・発赤が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 〈保管方法〉 常温・常湿で保管
- 〈使用期限〉 初回使用から3ヶ月間

【包装】

1 包 1 着入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社KEA工房

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目9番12号

TEL: 03-6228-5312

製造業者:株式会社 KEA 工房

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町3-24-2

ニュー本町ビル2階

 **KEA工房**

KEA工房カスタマーセンター

0120-36-2727

電話受付時間 10:00~19:00

13B3X10073-001-04
2009 年 1 月 7 日作成
2013 年 5 月 16 日改訂
2015 年 8 月 1 日改訂
2018 年 9 月 21 日改訂
2020 年 11 月 7 日改訂

*製造販売届出番号 13B3X10073000001

理学診療用器具 器 12 理学療法用器械器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000


ソフトフィットロング

【禁忌・禁止】

【形状・構造及び原理等】

下腹部圧迫用パンツ

製品例:

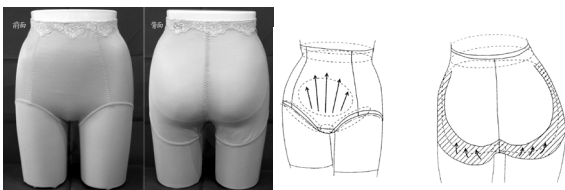

【包装】

1 包 1 着入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社KEA工房

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目 9 番 12 号

TEL: 03-6228-5312

製造業者:株式会社 KEA 工房

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町 3-24-2

ニュー本町ビル 2 階



*【使用目的、効能または効果】

リンパ液のうっ滞を軽減または予防するために、ソケイ部から下腹部にかけて段階的に圧迫を加え、リンパ液の流れを良好にする。

*【品目仕様等】

- ・針の残存(破損針を含む)がないこと
- ・糸のほつれがないこと
- ・糸ヨレがないこと

【操作方法又は使用方法等】

- ・通常の女性用肌着と同様に使用する。
- ・サイズの合ったものを使用する。
- ・他の弾性ストッキングと併用できる。
- ・圧迫力強化のためには別売の補助パットまたはワンタッチサポーターと併用する。

【使用上の注意】

- ・使用に際しては医師の判断を仰ぐ。
- ・着用していてもしびれや痛みが生じた場合、うっ血や下肢の発疹・発赤が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈保管方法〉 常温・常湿で保管

〈使用期限〉 初回使用から 3 ヶ月間

KEA工房カスタマーセンター

0120-36-2727

電話受付時間 10:00~19:00