

13B3X10073-003-04  
2009年1月7日作成  
2013年5月16日改訂  
2015年8月1日改訂  
2018年9月21日改訂  
2020年11月7日改訂

\*製造販売届出番号 13B3X10073000003

理学診療用器具 器 12 理学療法用器械器具  
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

## ワンタッチサポーター

### 【禁忌・禁止】

—


### 【包装】

1包1点入り

### 【形状・構造及び原理等】

下腹部圧迫用サポーター

製品例:

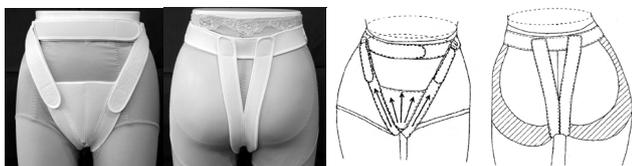

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社KEA工房

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目9番12号

TEL: 03-6228-5312

製造業者:株式会社KEA工房

神奈川県横浜市中区本町3-24-2 ニュー本町ビル

 KEA工房

### \*【使用目的、効能または効果】

リンパ液のうっ滞を軽減または予防するために、ソケイ部から下腹部にかけて段階的に圧迫を加え、リンパ液の流れを良好にする。

### \*【品目仕様等】

- ・針の残存(破損針を含む)がないこと
- ・糸のほつれがないこと
- ・糸ヨレがないこと
- ・ベルクロテープの着脱が異常なく行えること

### 【操作方法又は使用方法等】

- ・サイズの合ったものを使用する。
- ・他の弾性ストッキングと併用できる。
- ・圧迫力強化のためには別売の補助パットまたはソフトフィットロングと併用する。

### 【使用上の注意】

- ・使用に際しては医師の判断を仰ぐ。
- ・着用していてもしびれや痛みが生じた場合、うっ血や下肢の発疹・発赤が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談する。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<保管方法> 常温・常湿で保管

<使用期限> 初回使用から3ヶ月間

13B3X10073-003-04  
2009年1月7日作成  
2013年5月16日改訂  
2015年8月1日改訂  
2018年9月21日改訂  
2020年11月7日改訂

\*製造販売届出番号 13B3X10073000003

理学療法用器具 器12 理学療法用器械器具  
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

## ワンタッチサポーター


### 【禁忌・禁止】

—

### 【形状・構造及び原理等】

下腹部圧迫用サポーター

製品例:

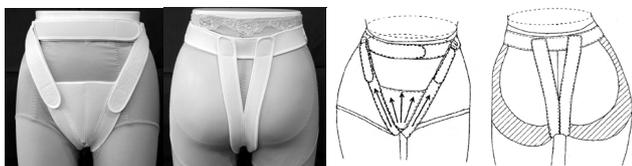

### \*【使用目的、効能または効果】

リンパ液のうっ滞を軽減または予防するために、ソケイ部から下腹部にかけて段階的に圧迫を加え、リンパ液の流れを良好にする。

### \*【品目仕様等】

- ・針の残存(破損針を含む)がないこと
- ・糸のほつれがないこと
- ・糸ヨレがないこと
- ・ベルクロテープの着脱が異常なく行えること

### 【操作方法又は使用方法等】

- ・サイズの合ったものを使用する。
- ・他の弾性ストッキングと併用できる。
- ・圧迫力強化のためには別売の補助パットまたはソフトフィットロングと併用する。

### 【使用上の注意】

- ・使用に際しては医師の判断を仰ぐ。
- ・着用していてしびれや痛みが生じた場合、うっ血や下肢の発疹・発赤が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談する。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈保管方法〉 常温・常湿で保管

〈使用期限〉 初回使用から3ヶ月間

### 【包装】

1包1点入り

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社KEA工房

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目9番12号

TEL: 03-6228-5312

製造業者:株式会社KEA工房

神奈川県横浜市中区本町3-24-2 ニュー本町ビル

 KEA工房