


理学診療用器具 器12 理学療法用器械器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000
パワーサポートガードル

【形状・構造及び原理等】

大腿部・下腹部圧迫用ショートストッキング（ガードルタイプ）

製品例：

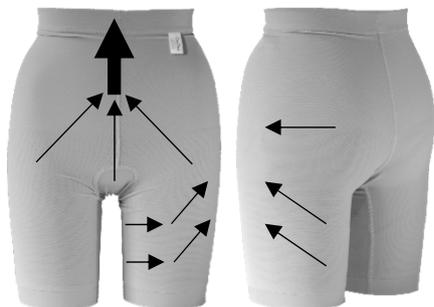

【使用目的、効能または効果】

リンパ液のうっ滞を軽減または予防するために、大腿部からソケイ部・下腹部にかけて段階的に圧迫を加え、リンパ液の流れを良好にする。

【品目仕様等】

- ・針の残存（破損針を含む）がないこと
- ・糸のほつれがないこと
- ・糸ヨレがないこと
- ・既定サイズに従って製造されていること

【操作方法又は使用方法等】

- ・通常の女性用肌着と同様に使用する。
- ・サイズの合ったものを使用する。
- ・他の弾性ストッキングと併用できる。
- ・圧迫力強化のためには別売の補助パットと併用する。

【使用上の注意】

- ・使用に際しては必ず医師の判断を仰ぐこと。
- ・着用してしびれや痛みが生じた場合、うっ血や下肢の発疹・発赤が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談する。
- ・肌への影響を最小限とするために、非常にデリケートな布地や糸を使用しています。着用する際には、貴金属などで引っ掛けたりしないよう、十分に気を付けてください。
- ・洗濯タグが付いている面が表面です。裏返しに着用しますと、正しい圧が加わりません。また、圧のバランスが崩れることで、ほつれや破損の原因にもなりますので、面の向きにご注意の上、着用ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- <保管方法> 常温・常湿で保管
- <使用期限> 初回使用から3ヶ月間

【包装】

1包1着入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 K E A 工房
〒104-0061

東京都中央区銀座八丁目9番12号

TEL： 03-6228-5312

製造業者：株式会社KEA工房

神奈川県横浜市中区本町3-24-2 ニュー本町ビル



KEA工房カスタマーセンター **0120-36-2727**

電話受付時間 10:00～19:00