

機械器具 5 8 整形用機械器具

管理医療機器 能動型下肢用他動運動訓練装置

特定保守管理医療機器 メッドフォルシュング スムースウォーカー (SmoothWalker)

【禁忌・禁止】

1. 以下の症状を示す人には適用しないこと
急性疾患、法定伝染病患者、その他医師が不適当と判断した者〔症状の悪化を引き起こす可能性がある。〕
2. 使用方法
 - 1) 本品は、下肢に対するリハビリ支援装置であり、この用途以外の目的で使用しないこと。〔症状の悪化やけがを引き起こす可能性がある。〕
 - 2) 本品を使用中に立ち上がらないこと。〔転倒等によりけがをする恐れがある。〕

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

本品は以下により構成される。

各構成部品は補充品として供給する場合がある。

- ・本体
- ・リモコン
- ・急停止リモコン
- ・ACアダプター
- ・電源コード

2. 形状及び各部の名称

本体



ACアダプター

リモコン

急停止リモコン

必ず取扱説明書をご参照ください。

3. 電氣的定格及び機器の分類

1) 電氣的定格

定格電源電圧：AC100V

定格電源周波数：50/60Hz

消費電力：27VA

2) 電撃に対する保護の形式及び電撃に対する保護の程度

保護の形式による分類：クラスⅡ

保護の程度による分類：BF 形装着部

4. 作動原理

本品は、内臓のモータによりフットプレート
を可動させ、設定した角度及び速度により、
一定の時間、往復運動を繰り返す装置である。

5. 仕様

- ・使用方法：横置き、縦置き
- ・底背屈動作角度： 底屈 0～40°
背屈 0～40°
- ・底背屈動作速度：低速、中速、高速
- ・動作時間：10 分、20 分
- ・強度：低、中、高
- ・モード：通常モード、ストレッチモード
- ・微動

詳細は取扱説明書を参照すること。

6. 使用環境条件

周囲温度：10℃～35℃

相対湿度：30%～80%（但し、結露しないこと）

気圧 : 800hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

下肢に装着し、足関節の癒着・拘縮の予防及び関節可動域の改善を行うために使用する。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- (1) 本体に、リモコン、急停止リモコン、ACアダプターを接続する。
- (2) 電源プラグをコンセントに接続し、電源スイッチを入れる。
- (3) フットプレートに密着するように足を乗せ、微動ボタンでフットプレートの角度を調節しながらフットガードで足と脛を固定する（本品は介護用靴を履いて使用する）。
- (4) 底屈角度、背屈角度、速度、強度、モード及び動作時間を設定する。

2. 使用中の操作

- (1) “スタート・ストップボタン”を押し、運動を開始させる。
- (2) 終了時は“スタート・ストップボタン”を押し、運動を終了する。なお、スタートから設定時刻が経過した時は、本品は自動で停止する。

3. 使用後の処置

- (1) フットガードを開放し、足を装置から外す。
- (2) 電源スイッチを切る。
- (3) 電源プラグをコンセントから抜く。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本品は、必ず介添者がいる所で使用すること。

- ・本品を設置する際は、床やベッドの上などの平らな場所、水のかからない場所に置くこと。

- ・浴室などの湿気の多い場所には設置しないこと。
- ・患足には適切なサイズの介護用靴を装着して使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・装置を絶対に改造したり、分解しないこと。
- ・本装置の付属品以外のものを使用しないこと。
- ・商用 100V 電源以外の電源を使用しないこと。
- ・電源スイッチ、リモコン類、及び足を固定するホルダー類と踵サポーター以外の場所には手を触れないこと。
- ・濡れた手で本体や付属品に触れないこと。
- ・動作中に足を固定しているマジックテープを外さないこと。
- ・エラー表示が出た場合は、一度電源スイッチを切り、再び電源スイッチを入れてスタートボタンを押すこと。それでも、エラーが表示される場合は、番号を確認の上、販売元に連絡すること。

その他の注意事項

- ・ケーブル類に足を引っかけないように注意すること。
- ・装置の使用中は、物を装置の中に落とさないように注意すること。落とした場合は、必ず電源スイッチを切ってから取り除くこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水等の液体がかからない場所に保管すること。

必ず取扱説明書をご参照ください。

・傾斜、振動、衝撃のない安定した場所に保管すること。

・直射日光を避け、埃の少ない室温で保管すること。

・保管条件

周囲温度：-10℃～+50℃

相対湿度：30%～80%（但し、結露しないこと）

気圧：800hPa～1060hPa

2. 耐用年数

付属品を除く本体の耐用期間：6年[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

・使用前に、本体、リモコン、ケーブル類に破損がないか確認すること。

・本装置は、いつも清潔にしてお使いください。

・本体が汚れた場合は、中性洗剤に浸した布を固く絞り、拭いてください。消毒する場合は、消毒用アルコールで拭いてください。

業者による保守点検事項

本品に不具合が発生した場合は、業者にて装置の保守のための点検や整備、部品交換等を行う。

【包装】

1セット／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：

ケーディークロート株式会社

電話番号：03-3763-9610

製造業者：

アベテクノシステム株式会社