

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ (JMDN コード:34858000)

再使用禁止

販売名：ポリープトラップトレッタマルチチャンバーGZM

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 各部の名称・仕様

(1) 本体



2. 寸法 (単位 mm、±10%)

項目	寸法
容器本体	61.3×60.0×80.5
吸引器接続孔 外径	7.5
接続チューブ外径/内径	11 / 8
接続チューブ長さ	150

3. 重量 (単位 g、±10%)

57.0

4. 原理

蓋の接続チューブを内視鏡の吸引口金に、吸引器接続孔を吸引器にそれぞれ接続する。蓋を持ちカップを回転させ、接続チューブを回収したいチャンバーに合せて、吸引を開始する。密閉された状態になり、吸引器からの負圧で切除したポリープ等が体液等とともに接続チューブを介して本体に吸引される。チャンバーおよび回収トレイ受けの底面の複数の微細な孔から体液・気体等は通過し、ポリープ等は各チャンバーに残留し、回収することができる。

5. 主な原材料(生体接触)

ポリカーボネート、塩化ビニル (DEHP フリー)、ABS 樹脂、シリコーン

【使用目的又は効果】

体液の回収のため吸引器とともに使用するキャニスタをいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

(1) 準備

- ① 袋から容器を取り出す。
- ② 本体蓋にある接続チューブを内視鏡の吸引口金に接続しっかりと接続する。
- ③ 容器本体の吸引器接続孔に吸引器のチューブを接続する。

(2) 回収

- ① 回収したいチャンバーの上に接続チューブがくるように、カップを回転させる。
- ② 切除したポリープがチャンバーに回収されるまで、内視鏡手技により吸引する。
- ③ 回収の有無は容器本体上面の拡大窓および側面から確認ができる。

(3) ポリープの取り出し

- ① ポリープがチャンバーに回収できたことを確認する。
- ② 回収したいポリープが複数ある場合は、(2)①～(3)①の動作を繰り返し、回収したいチャンバーを変更した後、再度ポリープを吸引する。
- ③ 吸引口金および吸引器接続孔から当該機器を取り外し、蓋を回転させて回収チャンバー受けの(△▽)のマークに蓋の溝を合わせて上部に引き上げる。チャンバーを回収トレイ受けから取り出す。

(4) 廃棄

本品は、単回使用の製品のため、地方自治体、院内規定等に従い廃棄をする。

【使用上の注意】

- ・ 本品は単回使用です。再使用、再処理、再滅菌をしないでください。[再処理や再滅菌に耐えられず、意図した通りに作動しない可能性がある。また、材料の劣化等により本品が破損する可能性がある]
- ・ 本品を使用する際は、手袋、保護メガネ、ガウンなどを着用してください。
[交差汚染や使用者がけがするおそれがある]
- ・ 蓋に取り付けられている接続チューブを外さないでください。
[蓋が破損し、内容物が漏洩する可能性がある]

【保管方法及び有効期限等】

<保管方法>

- ・ 高温、多湿、直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
- ・ 温度：-5～40℃
- ・ 相対湿度：30～70%

<有効期限>

個装袋記載の有効期限を参照すること。

【包装】

1 個入/1 包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： 日本アッシュ株式会社

住 所： 東京都八王子市横山町 3-6
八王子市横山町 JE ビル

電 話 番 号： 042-648-5350

製 造 業 者： 蘇州ジーゼットエムメディカル(中国)