

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

CORiTEC ミリングバー


【使用目的又は効果】

各種歯科用CAD/CAM材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する。

【形状・構造】

型式	作業部径 (b)	軸径 (a)	全長 (d)	首下長 (c)	対象	コーティング
526016 0303	φ0.3	3mm	48	10	Zr/PMMA/WAX	あり
526016 0603	φ0.6		48	20		なし
526016 1003	φ1.0		48	19		
526016 2503	φ2.5		48	20		
526013 1003	φ1.0		53	14	Zr/CADCAM冠	ダイヤモンド
526013 2503	φ2.5		53	20		
526005 0603	φ0.6		40	10	GlassCeramic	なし
526005 1003	φ1.0		40	10		
526005 2503	φ2.5		40	15		
526001 1506	φ1.5	6mm	53	30	Zr/PMMA	なし
526002 1506	φ1.5		46	24.5	Zr/PMMA	あり
526019 0306	φ0.3		50	26.5	Zr/PMMA/WAX	なし
526019 0606	φ0.6		53	30		
526019 1006	φ1.0		53	30		
526019 2506	φ2.5		53	30		
526012 0606	φ0.6		53	30	Zr/CADCAM冠	あり
526013 1006	φ1.0		53	30		
526013 2506	φ2.5		53	30		
526005 0606	φ0.6		40	20	GlassCeramic	ダイヤモンド
526005 1006	φ1.0		40	20		
526005 2506	φ2.5		40	20		
526021 1506	φ1.5		46	24.5		

材質:超硬合金

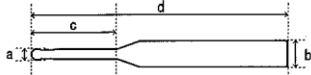

【使用方法】

- ・組み合わせて使用する医療機器(軸径3mm)
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
「CORiTEC 250シリーズ」医療機器届出番号:13B2X10463000001
「CORiTEC ワン」医療機器届出番号:13B2X10463000003
「CORiTEC 150シリーズ」医療機器届出番号:13B2X10463000011

- ・組み合わせて使用する医療機器(軸径6mm)
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
「CORiTEC 350シリーズ」医療機器届出番号:13B2X10463000002
「CORiTEC 350i Loader PROプラス」
医療機器届出番号:13B2X10463000006

【操作方法】

詳細な使用方法については、機器に付属の取扱説明書等を参照すること。

- (1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける
- (2) 適切なプログラミングで研削を行う

【使用上の注意】

- (1) 本材は、専用の加工機以外の機器には使用しないこと
- (2) 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと
- (3) 本材の加工、改造は行わないこと
- (4) 本材の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること
- (5) 本材は刃物である為、取り扱いには注意すること

取扱説明書を必ずご参照ください