

歯科材料 (09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

Rizen ミリングバー


【使用目的又は効果】

各種歯科用CAD/CAM材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する。

【形状・構造】

型式	作業部径 (a)	軸径 (b)	全長 (d)	首下長 (c)	対象	コーティング
T1	φ 3.0	6mm	50	14	Titanium	なし
T2	φ 2.0		50	12		
T4	φ 1.0		50	8		
T7	φ 1.0		50	5		
T8	φ 2.0		50	5		
T9	φ 2.2		50	16		
T10	φ 1.5		50	8		
T16	φ 2.0		50	5		
T17	φ 1.5		50	14		

材質: 超硬合金

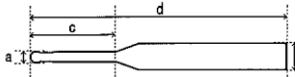

【使用方法】

・組み合わせて使用する医療機器 (軸径6mm)
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
「CORiTEC 350シリーズ」医療機器届出番号: 13B2X10463000002
「CORiTEC 350i Loader PROプラス」医療機器届出番号: 13B2X10463000006

【操作方法】

詳細な使用方法については、機器に付属の取扱説明書等を参照すること。

- (1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける
- (2) 適切なプログラミングで研削を行う

【使用上の注意】

- (1) 本材は、専用の加工機以外の機器には使用しないこと
- (2) 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと
- (3) 本材の加工、改造は行わないこと
- (4) 本材の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること
- (5) 本材は刃物である為、取り扱いには注意すること

【保管方法】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧 (物理的負荷) 及び汚染を受けないように保管すること

取扱説明書を必ずご参照ください