

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

CORiTEC Co-Cr/Ti用ミリングバー


【使用目的又は効果】

各種歯科用CAD/CAM材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する。

【形状・構造】

型式	作業部径 (a)	軸径 (b)	全長 (d)	首下長 (c)	対象	コーティング
526018 1003	φ1.0	3mm	38	12	Titanium	あり
526018 2003	φ2.0		38	13.5		
526018 3003	φ3.0		50	16		
526027 1006	φ1.0	6mm	50	25	Titanium	あり
526027 2006	φ2.0		50	25.5		
526026 3006	φ3.0		45	20.5		

材質:超硬合金

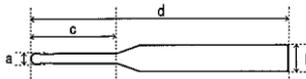

【使用方法】

・組み合わせて使用する医療機器(軸径3mm)

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

「CORiTEC 250シリーズ」医療機器届出番号:13B2X10463000001

「CORiTEC ワン」医療機器届出番号:13B2X10463000003

「CORiTEC 150シリーズ」医療機器届出番号:13B2X10463000011

・組み合わせて使用する医療機器(軸径6mm)

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

「CORiTEC 350シリーズ」医療機器届出番号:13B2X10463000002

「CORiTEC 350i Loader PROプラス」医療機器届出番号:13B2X10463000006

【操作方法】

詳細な使用方法については、機器に付属の取扱説明書等を参照すること。

- (1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける
- (2) 適切なプログラミングで研削を行う

【使用上の注意】

- (1) 本材は、専用の加工機以外の機器には使用しないこと
- (2) 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと
- (3) 本材の加工、改造は行わないこと
- (4) 本材の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること
- (5) 本材は刃物である為、取り扱いには注意すること

【保管方法】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

外国製造業者:imes-icore GmbH

外国製造業者国名:ドイツ

製造販売業者:株式会社CARESソリューションセンター

〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-5 REID-C南品川ビル4階

連絡先:0120-03-2280

取扱説明書を必ずご参照ください