

歯科材料（07） 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス（16189000）

C S C ワックスディスク

*【 形状・構造及び原理等 】

1. 形状及び寸法

型式	色調	形状
φ 98×10 mm	グレー	
φ 98×12 mm		
φ 98×14 mm		
φ 98×16 mm		
φ 98×18 mm		
φ 98×20 mm		
φ 98×22 mm		
φ 98×25 mm		

2. 成分

ポリエチレンワックス、着色染料、その他

3. 原理

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットにて切削加工を行い、歯科鑄造物のロウ型に用いる。

【 使用目的又は効果 】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のロウ型作製用キャスティングワックスとして使用する。

*【 使用方法等 】

〔組み合わせて使用する医療機器〕

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

〔使用方法〕

- 1）本材を CAD/CAM 加工機に装着し、切削加工を行う
 - 2）通法に従いマージンの調整、埋没、鑄造を行う
- 機器操作については、付属の取扱説明書等を参照すること

*【 使用上の注意 】

〔重要な基本的注意〕

- ・本材を切削・研磨する際は、粉塵による人体への影響を避けるため吸塵装置、保護メガネ、マスク等を使用し、粉塵を吸い込まないこと
- ・本材は、過度の加熱で使用しないこと
- ・本材は、過熱を要するので使用の際は火傷に注意すること
- ・再熔解してして使用しないこと
- ・石こう系埋没材を使用する場合、マージンにバリが出ることがある。その場合、急速加熱を避けるか、マージンをワックスで調整すること

*【 保管方法及び有効期間等 】

〔保管方法〕

- ・高温、多湿、直射日光の場所を避けて保管すること
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管場所に大量に保管しないこと
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売業者	株式会社 CARES ソリューションセンター 〒140-0004 東京都品川区南品川 2-2-5 REID-C 南品川ビル 4 階 電話 03-6433-2280 FAX 03-6433-2021
製造業者	SHANGHAI HULIANG BIO-TECH Co.,Ltd. (中華人民共和国)