


歯科材料 (09) 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研削器材 (70908000)

## CSC メタル用ミリングバー

### 【形状・構造及び原理等】

#### ※ 1. 形状・構造

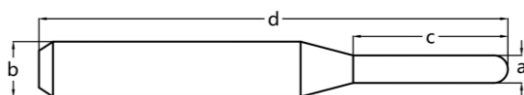

単位(mm)

型式	作業部径 (a)	軸径 (b)	首下長 (c)	全長 (d)
CSC-CD-03-0019	φ 3.0	6mm	14.0	50
CSC-CD-03-0002	φ 2.0	6mm	12.0	50
CSC-CD-03-0003	φ 1.0	6mm	8.5	50
CSC-CD-03-0029	φ 1.0	6mm	6.0	50
CSC-CD-03-0030	φ 2.0	6mm	7.5	50
CSC-CD-03-0031	φ 2.2	6mm	17.0	50
CSC-CD-03-0032	φ 1.5	6mm	10.5	50
CSC-CD-03-0033	φ 2.0	6mm	6.0	50
CSC-CD-03-0034	φ 1.5	6mm	15.5	50

#### 2. 材質 超硬合金

#### \*\* 3. 原理

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット (CAM マシン) に装着し、回転させた刃先部に歯科材料 (金属) を接触させて切削・研削し、歯科用補綴物を作製する。

### 【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

各種歯科用 CAD/CAM 材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する。

〔加工可能な材料〕

純チタン・チタン合金・コバルトクロム合金

### 【使用方法等】

〔組み合わせて使用する医療機器〕

・歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

「CORiTEC 350i シリーズ」

医療機器届出番号：13B2X10463000002

「CORiTEC 350i PRO プラスシリーズ」

医療機器届出番号：13B2X10463000006

〔使用方法〕

- 1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける。
  - 2) 適切なプログラミングで研削を行う。
- 詳細な使用方法については、機器に付属の取扱説明書等を参照すること。

### 【使用上の注意】

- ・本材は、専用の加工機以外の機器には使用しないこと。
- ・変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。
- ・本材の加工、改造は行わないこと。
- ・本材の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること。
- ・本材は刃物である為、取り扱いには注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧 (物理的負荷) 及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は室温で、外圧 (物理的負荷) を受けない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所や、塩分やイオウ分等のガスの発生する場所を避けて保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 CARES ソリューションセンター  
電話 03-6433-2280 FAX 03-6433-2021

製造業者 Bili (Shenzhen) Medical Devices Co., Ltd.  
(中華人民共和国)