


歯科材料（09） 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材（70908000）

CSC ジルコニア用ミリングバー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

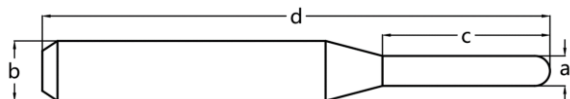

単位(mm)

型式	作業部径 (a)	軸径 (b)	首下長 (c)	全長 (d)
CSC-CD-03-0020	ϕ 2.0	6mm	25	50
CSC-CD-03-0021	ϕ 1.5	6mm	26	50
CSC-CD-03-0022	ϕ 1.8	6mm	28	50

2. 材質

超硬合金、ダイヤモンド（刃先部のみコーティング）

3. 原理

歯科用 CAM マシンに装着し、回転させた刃先部に歯科材料（金属）を接触させて切削・研削し、歯科用補綴物を作製する

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

各種歯科用 CAD/CAM 材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する

〔加工可能な材料〕

ジルコニア

【使用方法等】

〔組み合わせて使用する医療機器〕

・ 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

「CORiTEC 350i シリーズ」

医療機器届出番号：13B2X10463000002

「CORiTEC 350i PRO プラスシリーズ」

医療機器届出番号：13B2X10463000006

詳細な使用方法については、機器に付属の取扱説明書等を参照すること

- 1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける
- 2) 適切なプログラミングで研削を行う

【使用上の注意】

- ・ 本材は、専用の加工機以外の機器には使用しないこと
- ・ 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと
- ・ 本材の加工、改造は行わないこと
- ・ 本材の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること
- ・ 本材は刃物である為、取り扱いには注意すること

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること
- ・ 本材は室温で、外圧（物理的負荷）を受けない場所に保管すること
- ・ 化学薬品の保管場所や、塩分やイオウ分等のガスの発生する場所を避けて保管すること

取扱説明書を必ずご参照ください