

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ (34858000)

微量ボトル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。[感染防止のため]
2. 本品を使用する前には必ずヨックスディスポオペ S702 及びヨックスディスポホープ S802 の取扱説明書と添付文書および本添付文書をよく読み、理解された上で正しく使用すること。[記載事項に従わないと重大な事故に結びつくことがあるため]
3. 本品はヨックスディスポオペ S702 及びヨックスディスポホープ S802 に使用する専用のボトルである。他には使用しないこと。[正常な機能や安全を保てなくなるため]
4. 本品は、ヨックスディスポオペ S702 及びヨックスディスポホープ S802 のキャニスタにセットし、外科手術や治療などによって生じる血液、痰、生理食塩水などの汚物を吸引し、固形化させるボトルである。[再使用は行わないこと。感染の原因となるため]
5. 本品は樹脂製品である。穴を開けたり、高温にさらしたりしないこと。[汚物の飛散などにより感染の原因となるため]
6. 本品の取り付け、取り外し及び持ち運びの時、ボトルを落下させないこと。[ボトルが破裂し、けがの原因または、飛散した汚物などにより感染の原因となる]
7. ひび割れ、またはキズのあるボトルは絶対に使用しないこと。[ボトルが破裂し、けがの原因または、飛散した汚物などにより感染の原因となる]
8. 本品内の汚物がボトルの最大目盛 450mL になる前に吸引を中止すること。[満杯まで吸引すると、医療ガス配管設備及びアウトレットバルブが汚物により汚染されることがあるため]
9. 本品は、ディスポーザブル製品である。[再利用は絶対しないこと]
10. 本品をキャニスタにセット後、キャニスタからの吸引圧によりペイシエントホースの先端で吸引できることを必ず確認してから使用すること。[正常な機能や安全を保てなくなるため]
11. ボトル内に凝固剤を投入する時は、吸引器の吸引を止めずに実施すること。[汚物の飛散などにより、感染の原因となるため]
12. 当社の純正部品以外は使用しないこと。[正常な機能や安全を保てなくなるため]

2. 寸法及び重量

- 1) 寸法: $\phi 92 \times$ 高さ 250mm
- 2) 容積: 450mL
- 3) 重量: 160 $\pm$ 10g

3. 性能

ボトル実内容積: 450mL

4. 原理


真空吸引器ヨックスディスポオペ S702 及びヨックスディスポホープ S802 からの吸引圧により、体液等の汚物を吸い込みボトル内に貯留させる。貯留された体液が満杯になると接続したライナー内に汚物が流入する。凝固剤投入口キャップを開けて凝固剤を投入すると汚物が凝固される。

【使用目的または効果】

本品は、体液の回収を目的とし吸引器とともに使用する吸引器用キャニスタである。

【使用方法等】


1. 微量ボトルをキャニスタにセット
 - 1) 微量ボトルを用意する。
 - 2) 微量ボトルをキャニスタにあらかじめ取り付け付けた微量ボトルホルダーにセットする。

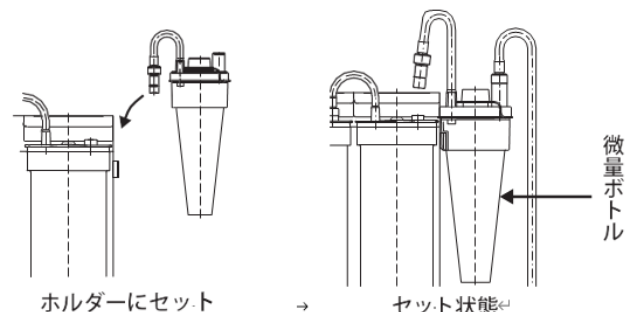

【形状・構造及び原理】


本品は、ヨックスディスポオペ S702 (届出番号 10B2X00014C00006) 及びヨックスディスポホープ S802 (届出番号 10B2X00014C00013) に接続し、貯留した汚物量を正確に計量するためのボトルである。

1. 形状

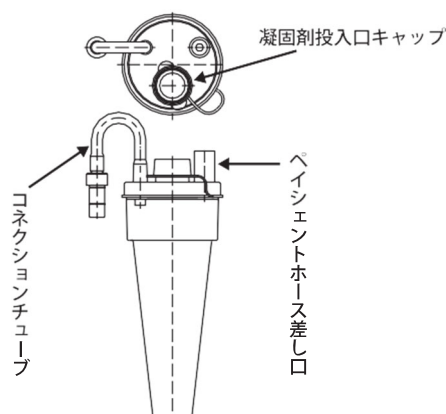

2. 微量ボトルをライナーに連結する。

- 1) 微量ボトルのコネクションチューブをあらかじめセットした隣のライナーのペイシエントホース接続口に根元までしっかりと差し込む。

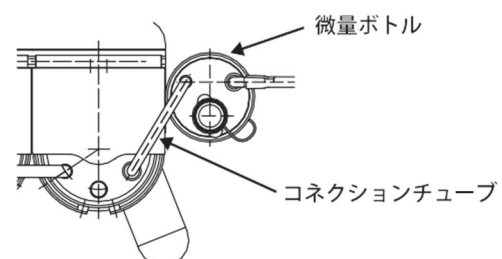

3. 操作方法

- 1) ペイシエントホースをペイシエントホース差し口に接続する。
- 2) 取り付け付けたキャニスタにて吸引を開始する。

3) ペイシェントホースの先端で吸引できることを確認する。
ペイシェントホースの先端を水に入れるか、ペイシェントホースの先端に親指の腹を当て吸引できることを確認してから吸引を開始する。

4) 吸引の実施


接続したペイシェントホースの先端から吸引する。

5) 吸引の中断及び停止

- ① 吸引を一時的に中断したいとき、または短時間使用しないときには、キャニスタの吸引を停止させる。
- ② 使用後は速やかにペイシェントホースを外し、ボトルの廃棄を行う。

4. ボトルの処理(廃棄処理)

- 1) 吸引が終了したら、再度キャニスタの吸引を開始し、コネクションチューブ「PATIENT」:ペイシェントホース接続口に差し換える。
- 2) 凝固剤投入口キャップを開けて、専用の凝固剤を投入する。
- 3) 凝固剤投入後、凝固剤投入口キャップをしっかりと閉じる。

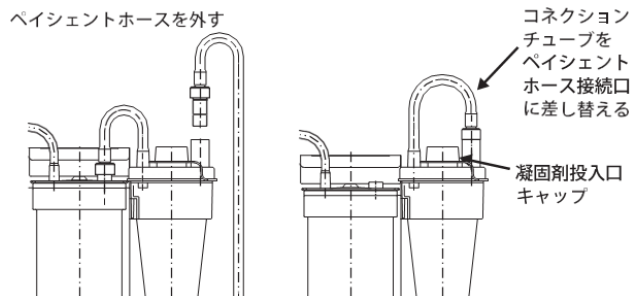

- 4) 微量ボトルを適合する法規に従って廃棄する。

【使用上の注意】

1. ライナーとの連結時、コネクションチューブのコネクターは奥まで差し込むこと。
2. チューブ類を抜き差しするときに無理な力を掛けないこと。
3. ペイシェントホースは内径φ6mmを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 1) 本品はポリ袋などに収納し、所定の保管場所にて保管すること。
 - 2) 保管場所の条件: 高温、ほこり、水、湿気等が無い場所であること。温度、ほこり、湿度、風通し、塩分、いおう分等を含んだ空気等により、悪影響の生じる恐れのない場所であること。化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと。

2. 耐用年数・使用期間

本品は上記の保管場所に於いて使用期限:3 年間

【取扱い上の注意】

本品を転倒及び落下等の衝撃を加えないこと。

【保守・点検に係る事項】

本品の使用前に必ずボトルに亀裂、損傷及び変色、劣化、落下等による変形等がないか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社小池メディカル
電 話 : 03-5662-6605(代)