


機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDN コード:35148000

「コーワ SL-15L」の付属品 パワーパック(SL-PP151)

【形状・構造及び原理等】

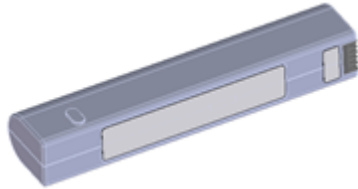

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (製造販売業者)

興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4番14号
* TEL (03)3279-7844

1. 構成
本品はパワーパックのみで構成される。
2. 寸法及び重量
135 mm(W)×25 mm(D)×30 mm(H)/120 g

【使用目的又は効果】

眼球等の観察、検査及び撮影をするために使用する。眼球に細隙光を投射し、その反射に可動式顕微鏡を傾斜的に併せ、反射面を観察する。
(コーワ SL-15L の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

本品をコーワ SL-15L 本体に取付け、本体の点灯スイッチを押し、照明光を被検眼に照射し、各種観察を行う。詳細はコーワ SL-15L の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

(パワーパック使用上の注意)

寿命になったパワーパックに充電すると液漏れをする可能性があります。又、予備のパワーパックでも、充電器のバックチャージ台で充電し続けると、寿命に至り、液漏れが発生することがあります。充電完了後は、バックチャージ台から外してください。液漏れした場合は、漏れた液には触れないでください。万一、皮膚についたり、目に入った場合は、直ぐにきれいな水で洗い流して、医師の診断を受けてください。

(充電に関する注意)

パワーパックは、1 日のご使用時間が 20 分程度の場合、2 週間に 1 度の充電をしてください。パワーパックは、充電せずに放置するとご使用できなくなります。

コーワ SL-15L の添付文書及び使用上のご注意(別紙)を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

コーワ SL-15L の添付文書を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

コーワ SL-15L の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

取扱説明書を必ずご参照ください