

機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDNコード:35148000

「コーワ SL-19」の付属品 充電台 (SL-CB191)

【形状・構造及び原理等】



1. 概要

本機器はコーワ SL-19の別売付属品であって、パワーパック(「コーワ SL-19」の付属品 パワーパック(SL-PP191))を充電するために使用する。パワーパックをコーワ SL-19に取り付けた状態の他、パワーパック単体でも充電することができる。

2. 構成

本機器は充電台のみで構成されており、その他に USB ケーブル(市販品)と AC アダプター(市販品)が付属する。

3. 電磁両立性

本機器は、JIS T 0601-1-2:2018 に適合している。

4. 電氣的定格

入力 DC 5V 2A

出力 5W

5. 寸法及び質量

125 mm(W)×168 mm(D)×31 mm(H)/160g

【使用目的又は効果】

眼球等の観察、検査及び撮影をするために使用する。眼球に細隙光を投射し、その反射に可動式顕微鏡を傾斜的に併せ、反射面を観察する。

(コーワ SL-19の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

- 充電台と USB ケーブル、AC アダプターを接続し、AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込む。
- コーワ SL-19にパワーパックを取り付ける。
- パワーパックを取り付けたコーワ SL-19を充電台の本体用ガイドラインに合わせて置くと、充電を開始する。
- パワーパック単体で充電するときは、パワーパックを専用パワーパック用ガイドラインに合わせて置くと、充電を開始する。

詳細は、コーワ SL-19の取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- 本機器でパワーパック以外を充電しないでください。
- 充電中は、本機器に触り続けしないでください。
- コンセントや配線器具の定格をこえる使い方をしないでください。
- 推奨する AC アダプター以外を接続しないでください。

詳細は、コーワ SL-19の取扱説明書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

コーワ SL-19の注意事項等情報を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

コーワ SL-19の注意事項等情報及び取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4番14号

TEL (03)3279-7844

取扱説明書を必ずご参照ください