
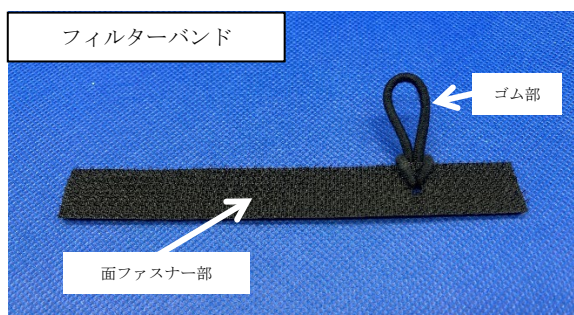


機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDN コード:35148000

「コーワ SL-19」の付属品 バリアフィルターB (SL-RF191)

【形状・構造及び原理等】

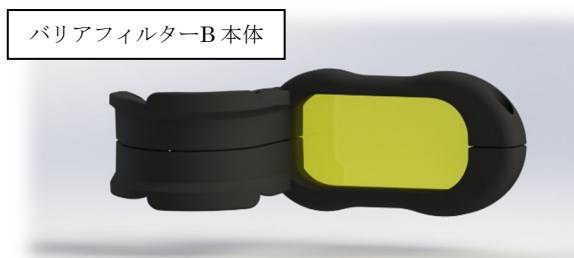

1. 概要
本機器はコーワ SL-19 基本モデルの別売付属品、カメラモデルの標準付属品であって、フルオレセイン染色した観察対象に青色照明光を照射し、蛍光像を鮮明に観察するために使用する。
2. 構成
本機器はバリアフィルターB とフィルターバンドで構成されている。
3. 寸法及び質量
バリアフィルターB: 71 mm(W) × 31 mm(D) × 25 mm(H) / 10g
フィルターバンド: 130 mm(W) × 16 mm(D) / 1g

【使用目的又は効果】

眼球等の観察、検査及び撮影をするために使用する。眼球に細隙光を投射し、その反射に可動式顕微鏡を傾斜的に併せ、反射面を観察する。
(コーワ SL-19の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

1. バリアフィルターB にフィルターバンドを取り付ける。
2. コーワ SL-19 にバリアフィルターB を取り付ける。
3. フィルターバンドをコーワ SL-19 に固定する。
4. 照明角度目盛を目安におよそ 30 度の位置に照明ユニットを回転させる。
5. 青照明を点灯させ、フルオレセイン染色を行った観察対象に青色光を照射し、蛍光像を観察する。

詳細は、コーワ SL-19の取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- ・フィルターバンドのゴム部の内部には天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- ・フィルターを取り付けるときは、投光プリズムの上下/ 前後方向に抜き差ししてください。

詳細は、コーワ SL-19の取扱説明書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

コーワ SL-19の注意事項等情報を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

コーワ SL-19の注意事項等情報及び取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目 4 番 14 号
TEL (03) 3279-7844

取扱説明書を必ずご参照ください