

器54 医療用捲綿子

一般医療機器 医科用捲綿子 JMDN10172000


プロヴォックス アクセサリー（1）

【警告】

- ・プロヴォックス フラッシュ（以下、フラッシュ）を操作する患者は、手先が十分器用であり、十分な視力と良好な認知能力のあることが推奨される。
- ・ボイスプロステシスに力を加えないこと。[ボイスプロステシスが食道内に脱落する場合がある。]
- ・フラッシュがボイスプロステシスに入る前に球体部を押し込まないこと。[水が気管に入ると咳を引き起こす場合がある。] ボイスプロステシスからフラッシュを取り出す前に球体部に空気を入れること。

【形状・構造及び原理等】

(1) プロヴォックス ブラシ

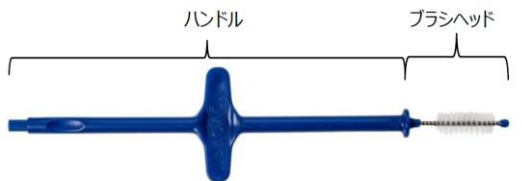


原材料

ブラシヘッド：ステンレススチール、ポリアミド

ハンドル：ポリプロピレン

(2) プロヴォックス フラッシュ

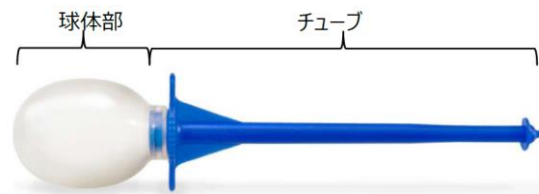

原材料

チューブ：ポリプロピレン

球体部：シリコーン

【使用目的又は効果】

喉頭摘出患者の気管食道瘻に装着したボイスプロステシスを清掃する。

【使用方法等】

(1) プロヴォックス ブラシ





(使用前)

使用する前に以下の項目を点検し、破損を見つけたらそのブラシを廃棄し、新しいものを使用する。

- ・ブラシヘッド先端の欠け、緩み
- ・ブラシヘッドの毛の部分の摩耗、緩み
- ・ブラシヘッドのワイヤーの曲がり、破損
- ・ハンドル全体の破損

(使用方法)

- 1) ブラシヘッドの先をボイスプロステシスの内腔に慎重に挿入する。
- 2) 挿入しにくい場合は、青いハンドル部分を曲げてブラッシングしやすい角度に調節する。
- 3) ハンドルをゆっくり前後に動かし、回しながら引き抜き、ブラシヘッドに汚れが付かなくなるまで数回繰り返す。
- 4) 使用後は、【保守・点検に係る事項】<洗浄>の手順により洗浄を行う。

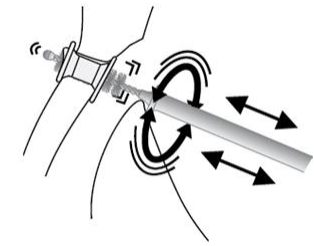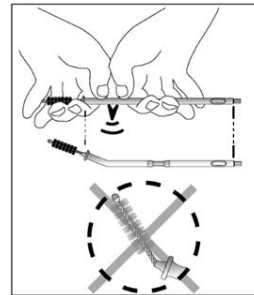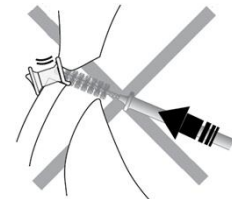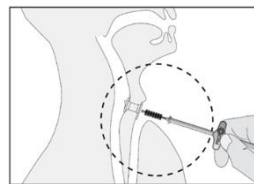

使用方法に関連する使用上の注意

- ・本品は単一患者のみに使用する製品のため、複数の患者に使用しないこと。[交差感染を生じるおそれがある。]
- ・指定以外の方法で洗浄または消毒を行わないこと。[製品の破損または患者への傷害のおそれがある。]
- ・ブラシヘッドのワイヤー部を曲げないこと。[製品の破損のおそれがある。]

(2) プロヴォックス フラッシュ

(使用前)

使用前にコップ等に入れた飲料水にフラッシュを挿入し、球体部を押し込み戻すことで吸い上げさせ、球体部の押し込みにより吸い上げた飲料水を廃棄することを3回繰り返す。


その後に新しい飲料水へフラッシュを挿入し、球体部を押し込み戻すことで吸い上げさせる。

(使用方法)

- 1) フラッシュのチューブ先端をボイスプロステシスの内腔に慎重に挿入する。
- 2) 挿入しにくい場合は、青いチューブ部分を最大25度まで曲げて、挿入しやすい角度に調節する。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

- 3) 球体部を凹ませて食道側に水滴が落ちるようにボイスプロステシス内を洗浄する。
- 4) 水を流した後、球体部から手を離し、球体部が膨らんだ状態でチューブをもって引き抜く。
- 5) 使用後は、【保守・点検に係る事項】<洗浄>の手順により洗浄を行う。

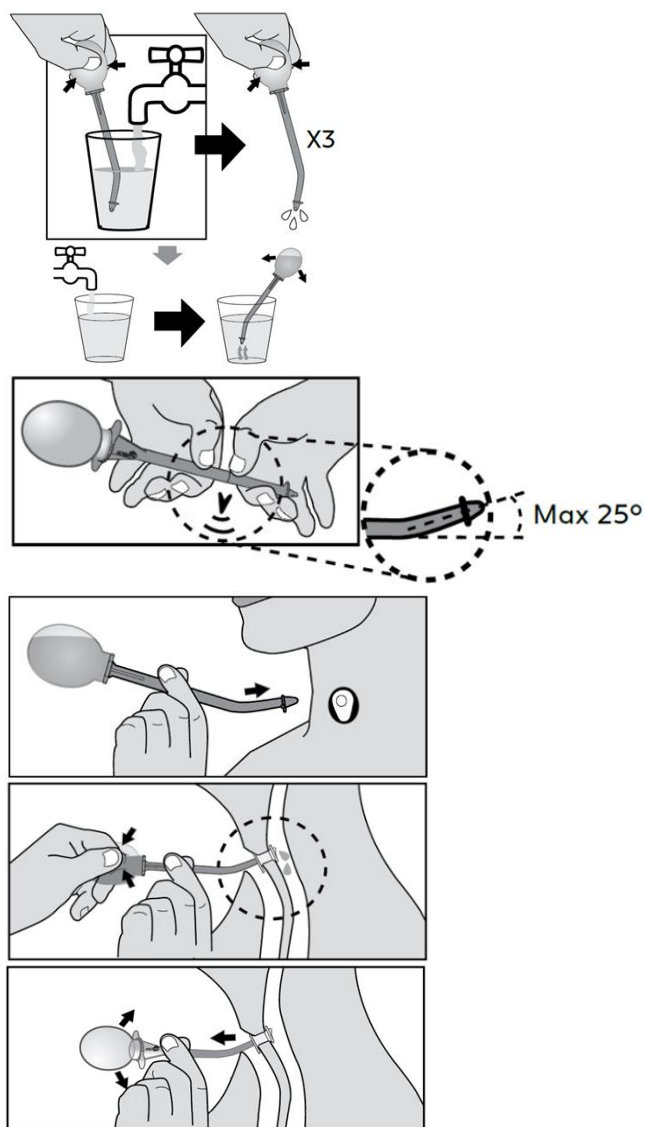

使用方法に関連する使用上の注意

- ・本品は単一患者のみに使用する製品のため、複数の患者に使用しないこと。[交差感染を生じるおそれがある。]
- ・指定以外の方法で洗浄または消毒を行わないこと。[製品の破損または患者への傷害のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所で保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

<有効期間（未開封状態）>

- ・本品の外箱に記載されている表示のとおり。


<使用期間>

- ・プロヴォックス ブラシは1か月を目安に交換すること。
- ・プロヴォックス フラッシュは1年を目安に交換すること。


【保守・点検に係る事項】

<洗浄>

- (1) プロヴォックス ブラシ

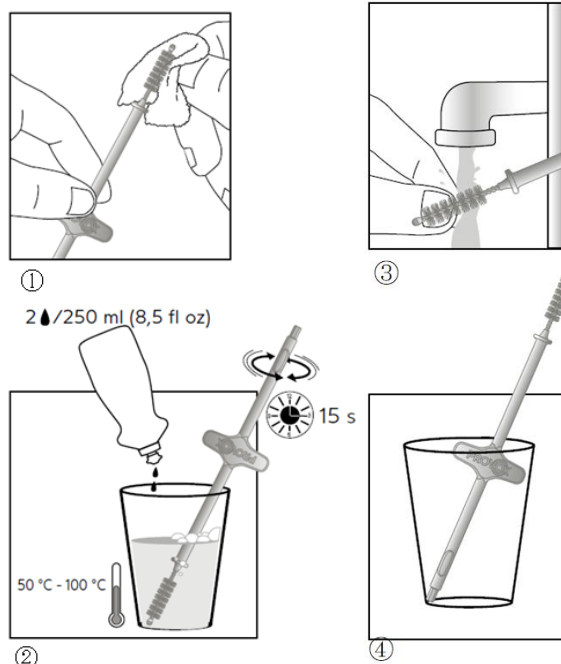

- (2) プロヴォックス フラッシュ

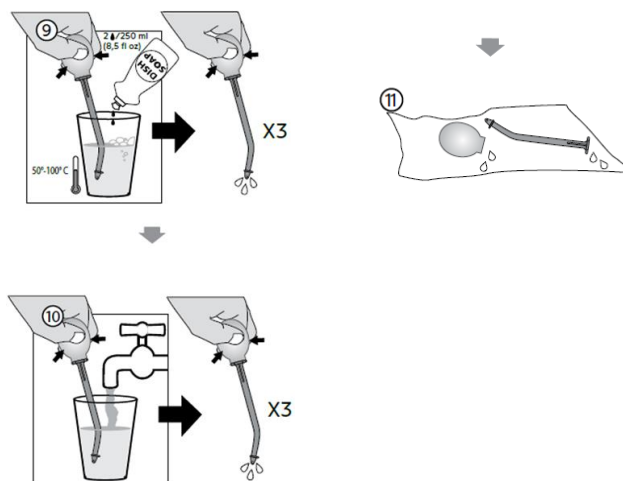

<消毒>

- 少なくとも1日1回、以下のいずれかの方法で消毒をすること。
- *消毒用エタノール（濃度76.9～81.4 vol%）に10分間浸漬する。
 - *イソプロピルアルコール（70%）に10分間浸漬する。
 - *3%過酸化水素水（オキシドール）に60分間浸漬する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：コロプラスト株式会社
 住 所：東京都千代田区九段南2-1-30
 イタリア文化会館ビル
 T E L :03-3514-4141
 製造業者名：ATOS Medical AB（スウェーデン）

取扱説明書を必ずご参照下さい。