


カテーテルコネクタ AK4300

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

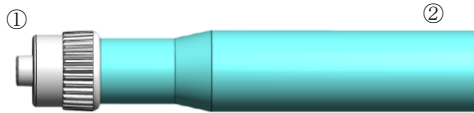

番号	名称	機能
①	オスルアーコネクタ	泌尿器用カテーテルに接続する。 EN ISO 80369-1:2018 に適合。
②	シース	蓄尿バッグ等の容器に接続する。

原材料：スチレン系エラストマー、アクリル

【使用目的又は効果】

泌尿器用カテーテルを蓄尿バッグ等の容器に接続するために用いる。

【使用方法等】

コネクタの接続

1. 本品は無菌的に包装から取り出してください。
2. 本品オスルアーコネクタを尿管カテーテル等に接続してください。
3. 蓄尿バッグコネクタを本品のシースに接続してください。
4. 接続部に漏れがないことを確認してください。

取り外し

使用後はコネクタを外し、欠け等がないことを確認してください。

交換

カテーテルやステントを交換する場合は、本品も交換してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ・ 単回使用製品の再使用は、患者へのリスクを高める可能性がある。
 - ・ 再処理、再消毒及び再滅菌は、患者への感染、術者への追加リスク及び製品の品質を保持できない可能性がある。
 - ・ 泌尿器用カテーテル等から蓄尿バッグ等への尿の流出を定期的に確認すること。
2. 不具合・有害事象
 - 1) その他の不具合
 - ・ 漏れ
 - ・ 接続不良
 - ・ 閉塞
 - 2) その他の有害事象
 - ・ 尿路感染症

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 使用期間
本品の継続使用期間は 12 日以内とすること。（自己認証による）
3. 使用の期限
直接の包装及び外箱を参照してください。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

コロプラスト株式会社

住所：東京都千代田区九段南 2-1-3 イタリア文化会館ビル

製造業者

Coloplast A/S（コロプラスト社）

国名：デンマーク



*販売業者

*株式会社キースマック

*住所：東京都千代田区神田猿樂町 2-2-8

*電話番号：03-3292-2506

*FAX 番号：03-3292-2507