

スピーディ カテ (ネラトン、チーマン)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

尿道へ挿入される部分に親水性コーティングが施された導尿用カテーテルであり、ポリエチレングリコール等張液が封入されている。カテーテルの先端は閉じており、2つの側孔がある。尿道経由で膀胱に挿入し、間欠導尿に用いる。また、患者自身による間欠自己導尿に用いることができる。

カテーテルの材質：ポリウレタン

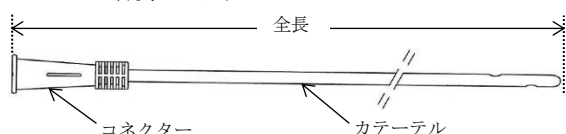

種類	外径		使用時の全長 (mm)
	(mm)	(Fr/Ch)	
ネラトン 40	2.7	8	393
	3.3	10	
	4.0	12	
	4.7	14	
	5.3	16	
チーマン 40	3.3	10	393
	4.0	12	
	4.7	14	
ネラトン 20	2.0	6	200
	2.7	8	
	3.3	10	
	4.0	12	
	4.7	14	
ネラトン 30	2.0	6	300
	2.7	8	
	3.3	10	

【使用目的又は効果】

膀胱内に挿入し、導尿、採尿、膀胱洗浄等を行うための尿誘導用カテーテルである。


【使用方法等】

導尿前の準備(男女共通)

1. 手洗いをし、尿道口及びその周辺を清拭してください。これは、手指からカテーテルに細菌の混入を防ぐために重要です。
- * 介助者（家族や医療従事者）が導尿をする場合は、手を洗って乾かした後、清潔な手袋を着用してください。
2. 個包装にはコーティングされたカテーテルが水溶液の中に封入されています。本品が垂直に保管されていた場合には、水溶液がカテーテル全体に行き渡るように、本品を水平にして個包装内の水溶液を均等に行き渡らせます。カテーテルが水溶液に接触することでコーティングが活性化し、最適な潤滑状態を保ちます。
3. 開封する前に導尿の準備が済んでいるかを確認してください。

4. 包装をゆっくりと開封してください。

包装背面上部のシールを乾いた水平面に貼付し、包装表面のリング部分を手前に引き開封することもできます。

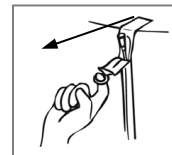

5. カテーテルを取り出してください。そのまま導尿することができます。開封後はすみやかに使用してください。

- * 6. 近くにトイレがない場合、蓄尿バッグにつないで使用することもできます。

カテーテル挿入

<男性・男児>

自己導尿の場合

1. 片手でペニスを持ち上げ、尿道をまっすぐにしてください。
- * 2. ペニスの上部先端を両側からやさしく握って、尿道口を開いてください。
3. もう一方の手でコネクターを持って、約2cm ずつカテーテルを尿道へ挿入してください。
4. カテーテルが膀胱に入る直前、括約筋による抵抗を感じることがあります。
5. ペニスは強く握らないでください。カテーテルが挿入しづらくなります。



- * 介助導尿の場合

1. ペニスを患者の腹側に向けて持ちあげてください。このポジションがカテーテルの尿道への挿入を容易にします。
2. ペニスの上部先端を両側からやさしく握って尿道口を開き、コネクターを持って、カテーテルを尿道にゆっくりと挿入してください。
3. 尿が流出し始めるまで、カテーテルの挿入を続けてください。

チーマン型の場合

1. カテーテルを挿入する前に、カテーテル先端の曲がっている先が上を向いていることを確認してください。
2. コネクターにある突起物はカテーテルの向きが正しくなるよう、デザインされています。カテーテルを水平に持った際にこの突起物が上を向いているとカテーテル先端の曲がっている先も上を向きます。

<女性・女児>

自己導尿の場合

1. 片手で陰唇を開き、尿道口を露出させてください。
2. もう一方の手でコネクターを持って、約2cm ずつカテーテルを尿道へ挿入してください。
3. カテーテルが膀胱に入る直前、括約筋による抵抗を感じることがあります。



介助導尿の場合

- * 1. 片手で患者の陰唇を開き、尿道口を露出させてください。
2. コネクターを持って、カテーテルをゆっくりと尿道へ挿入してください。尿が流出し始めるまで、カテーテルの挿入を続けてください。
3. もう一方の手を自由にするために、陰唇から手を離してもかまいません。

尿の排出からカテーテル抜去(男女共通)

1. 尿が流出し始めるまで、膀胱内へカテーテルを挿入し続けてください。
- * 2. 尿の流出が止まったら、カテーテルを軽く回して、膀胱に残っている尿を排出します。その後、カテーテルを1~2cm抜いてください。
チーマンカテーテルの場合の注意
チーマンカテーテルは、膀胱内でカテーテルを回さないでください。
3. 尿が再び流出した場合、数秒待った後、カテーテルを1~2cm抜いてください。
4. 尿の流出が止まったら、カテーテルをゆっくりと抜いてください。

* 廃棄

在宅で使用する場合には、廃棄に関して下記の内容を患者等に指導してください。

- 本製品は単回使用のみを目的としていますので、使用後は、通常の家庭ごみと一緒に廃棄するなど、地域のガイドラインに沿って廃棄してください。
- 蓄尿バッグを接続している場合は、カテーテルと一緒に廃棄するか、蓄尿バッグの使用説明書に従って、蓄尿バッグをカテーテルから取り外して空にしてください。
- トイレには流さないでください。

【使用上の注意】

- * 1. 重要な基本的注意
 - 本品を患者が在宅等で使用する場合には、本品の使用方法及び使用上の注意について、医療従事者が指導を行ってください。
 - 小児又は成人で導尿に家族による介助が必要な場合、家族に対して、使用方法や使用上の注意を医療従事者から指導を行ってください。
 - 患者が在宅で自己導尿を行っている際にカテーテルが膀胱からの抜去がスムーズに行えない場合、サイズやカテーテルの種類を変更する必要がある可能性があるため、医療従事者へ連絡するよう指導してください。
 - 患者が在宅で自己導尿を行う際には、尿路感染症の症状である可能性があるため、発熱、膀胱洗浄時の不快感、頻回の尿意、血尿などの症状がある場合は、医療従事者へ連絡するよう指導してください。
2. 不具合、有害事象
 - * ● その他の有害事象
 - ・ 発熱
 - ・ 膀胱を空にする時の不快感
 - ・ 頻回の尿意切迫感
 - ・ 血尿、出血
 - ・ 誤挿入
 - ・ 尿道狭窄
3. その他の注意
 - 単回使用製品の再使用は、患者へのリスクを高める可能性があります。
 - 再処理、再消毒及び再滅菌は、患者への感染、医療従事者の追加リスクの可能性もあります。
 - * ● 本製品は天然ゴムを使用していませんが、製造または包装時にまれに微量の天然ゴムが混入することがあり、天然ゴムアレルギーを持つ患者にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。
 - 包装内の液体がしみや汚れになることがあります。
 - * ● 3時間以内であれば、丸めた状態で保管できます。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件
直射日光及び高温多湿、凍結を避けて保管すること。
2. 使用の期限
直接の包装及び外箱を参照(自己認証による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売者
コロプラスト株式会社
住所：東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル

** 製品問い合わせ窓口
コロプラスト サポートライン
0120-56-1515

製造業者
Coloplast A/S (コロプラスト社)
国名：デンマーク

