

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル JMDN36125000

## スピーディ カテ (ナビ30)

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


##### 1. 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

尿道へ挿入される部分に親水性コーティングが施された導尿用カテーテルである。排尿用ファネルを備えたカテーテルの先端は閉じており、2つの側孔がある。カテーテルの先端付近が細くくびれている。インサーショングリップが装着されたカテーテルが直線状に包装されている。滅菌包装内にポリエチレングリコール等張液が封入されている。

尿道経由で膀胱に挿入し、間欠導尿に用いる。また、患者自身による間欠自己導尿に用いることができる。

カテーテルの材質：ポリウレタン

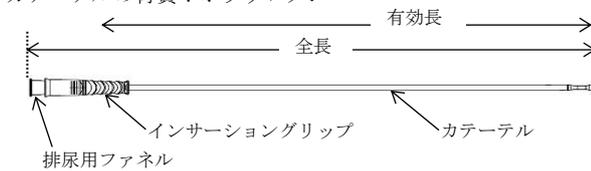

種類	外径		全長 (mm)	有効長 (mm)
	(mm)	(Fr/Ch)		
ナビ 30 成人用/小児用	3.3	10	300	233
	4.0	12		
	4.7	14		
	5.3	16		

有効長：コーティングが施されている部分の長さ

#### 【使用目的又は効果】

膀胱内に挿入し、導尿、採尿、膀胱洗浄等を行うための尿誘導用カテーテルである。


#### 【使用方法等】

##### 導尿前の準備

1. 手洗いをし、尿道口及びその周辺を清拭してください。これは、手からカテーテルへの細菌の付着を防ぐために重要です。介助者が導尿を行う場合、介助者は手洗いをし、手を乾かした後、清潔な手袋を装着します。
2. 個包装にはコーティングされたカテーテルが潤滑液と共に封入されています。本品が垂直に保管されていた場合には、潤滑液がカテーテル全体に行き渡るように、本品を水平にしてカテーテルを潤滑液に浸漬してください。潤滑液に浸漬することでコーティングが活性化し、潤滑性が発揮されます。
3. 開封する前に、導尿の準備が完了していることを確認してください。開封後は速やかに使用してください。

##### 4. 開封方法 1:

包装背面上部のシールを乾いた水平面に貼付し、包装表面のリング部分を手前にゆっくりと引き下ろします。

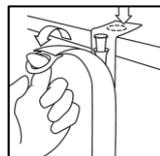


##### 開封方法 2:

包装上部を両手でゆっくりと開封します。

5. カテーテルを蓄尿バッグ等に接続することもできます。



6. インサーショングリップを握って、カテーテルを取り出します。このまま使用することができます。

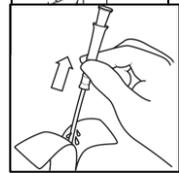


7. インサーショングリップをカテーテル先端方向に引いて排尿用ファネルから離します。インサーショングリップの波状部分を掴んで保持してください。



#### カテーテル挿入

##### <男性の場合>

1. 尿道をまっすぐにするために、片手でペニスを持ち上げてください。ペニスを支えながら、インサーショングリップで挿入したカテーテルの先端を尿道口に挿入します。ペニスの上部側面を優しく持つと、尿道口が開きます。カテーテルをしっかりと持てるよう、インサーショングリップの波状部分をつまんでください。

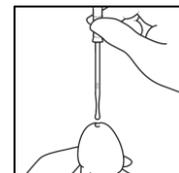


2. カテーテル先端が尿道に挿入されたら、インサーショングリップから力を抜きながら、インサーショングリップを排尿用ファネルの方向にずらします。

3. インサーショングリップをずらしながら、尿が流れ始めるまでカテーテルを膀胱内に挿入してください。




カテーテルが膀胱に入る直前に、括約筋による抵抗を感じることがあります。カテーテル挿入が難しくなるため、ペニスを圧迫しないようにしてください。

4. インサーショングリップを排尿用ファネルまでずらし、排尿用ファネルに取り付けます。

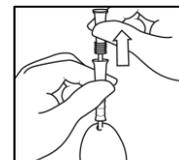


#### カテーテル抜去

1. 尿の流出が止まったらカテーテルを 2~3cm 引き抜きます。さらに排尿があれば、数秒間待ってからカテーテルをもう 1~2cm 引き抜きます。膀胱が完全に空になったらすみやかに、カテーテルをゆっくり引き抜きます。

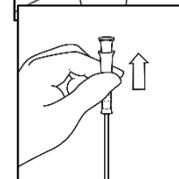

## 廃棄

1. 使用後のカテーテルは包装に戻して廃棄できます。カテーテルと包装は一般の燃えるごみとして捨てることができますが、それぞれの自治体のごみ廃棄方法に従ってください。本品をトイレに流さないでください。

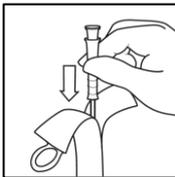

2. 蓄尿バッグ等に接続した場合は、カテーテルを蓄尿バッグ等と一緒に廃棄するか、カテーテルを取り外し、蓄尿バッグ等の取扱説明書に従って尿を廃棄してください。

## 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - 本品を在宅等で患者もしくは介助者が使用する場合には、本品の使用方法及び使用上の注意について、医療従事者が指導してください。
  - 本品を小児が使用する場合には、小児が一人で導尿できるようになるまで介助者が介助してください。
2. 不具合、有害事象
  - その他の有害事象
    - ・ 発熱
    - ・ 膀胱を空にする時の不快感
    - ・ 頻回の尿意切迫感
    - ・ 血尿
3. その他の注意
  - 単回使用製品の再使用は、患者へのリスクを高める可能性があります。
  - 再処理、再消毒及び再滅菌は、患者への感染や医療従事者への追加リスクの可能性があります。
  - 24時間以内であれば、 $-18^{\circ}\text{C}$ ～ $50^{\circ}\text{C}$ で保管可能です。
  - 3時間以内であれば、丸めた状態で保管可能です。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件  
直射日光及び高温多湿、凍結を避けて保管すること。
2. 使用の期限  
直接の包装及び外箱を参照(自己認証による)。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者  
コロプラスト株式会社  
住所：東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル

\* 製品問い合わせ窓口  
コロプラスト サポートライン  
0120-56-1515

製造業者  
Coloplast A/S (コロプラスト社)  
国名：デンマーク

