

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 気管切開患者用人工鼻 70571000
トラキフォン

再使用禁止

【警告】

併用医療機器

- ・他の加温器又はネブライザーとの併用は絶対にしないでください。【フォームが目詰まりを起こし、呼吸ができなくなるおそれがあります。】

使用方法

- ・分泌物が溜まったときは直ちに新品と交換してください。【分泌物が付着することにより、流量抵抗が上昇したり、閉塞したりする可能性があります。】

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

- ・適用の一回換気量の場合以外は使用しないでください。【デッドスペースの増加により低流量では二酸化炭素が滞留したり、高流量では加温が不十分となるおそれがあります。】
- ・自発呼吸のある患者以外に使用しないでください。【分泌物が付着することにより、流量抵抗が上昇したり、閉塞したりする可能性があります。】
- ・脱水定例にある患者、分泌物過多、又は粘稠度が高い患者には使用しないでください。【分泌物が付着することにより、流量抵抗が上昇したり、閉塞したりする可能性があります。】

併用医療機器

- ・加温加湿器を併用した場合、人工鼻のフィルタが閉塞し、換気が困難となるおそれがあります。

使用方法

- ・再使用禁止。本品は未滅菌品ですが、一回限りの医療機器であるため再使用しないでください。
- ・分泌物が付着していない場合でも、24時間以上を超えて使用しないでください。付着物が多いときは24時間以内でも交換してください。分泌物過多でない場合も分泌物が付着することにより、流量抵抗が上昇したり、閉塞したりする可能性があります。

【使用方法等】

使用方法

＜装着方法＞

- ・気管切開チューブ、又は気管内チューブ先端の15mmコネクタに接続します。接続部固定されていることを確認してください。
- ・補助的に酸素を供給する場合は酸素ポートに4mmの酸素チューブを接続してください。
- ・喀痰吸引する場合、吸引ポートに吸引カテーテルを挿入します。
- ・スピーチバルブ機能があります。吸引ポート部分を指で押し込むことで、呼吸は声門を通過して口に抜けるため発音ができます。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・他の器具と接合して使用する場合は、閉鎖がおこなえないよう十分に呼吸・排気回路が確保されることを確認し使用してください。
- ・患者を注意深くモニターしてください。異変がみられる場合は、本品を取り外すか、新品に取り替えてください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避け、常温常圧下で保管してください。
- ・傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所で保管してください。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管してください。

＜有効期間（未開封状態）＞

- ・本品外箱に記載されている表示を参照してください。

＜使用期間＞

- ・最長24時間で交換してください。

【形状・構造及び原理等】

本品は、気管切開チューブ、又は気管内チューブ先端の15mmコネクタに接続する人工鼻です。

＜適用＞

一回換気量：50mL～1000mL

＜規格＞

重量：2.9g 長さ：22mm

高さ：28mm 幅：38mm

抵抗：0.36±0.15cmH₂O @30L/min

死腔：9.5mL

＜原材料＞

外殻：ポリプロピレン製

フォーム：ポリウレタン製



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：コロプラスト株式会社

住所：東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル

TEL：03-3514-4141

製造業者：ATOS Medical AB（スウェーデン）

【使用目的又は効果】

患者の呼吸を利用し、気道内の加温加湿のために使用する。