

器 65 歯科用充填器

70680000 歯科用充填器

販売名：ミルテックス コンポジット充填器 チタン製

【禁忌・禁止】

- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 器具の形態変更や改造等はないこと。
- 器具を落としたり、強い衝撃を与えたりしないこと。

【形状・構造及び原理等】



原 材 料：ステンレススチール

作 業 部：ゴールド窒化チタン加工

充填時にコンポジットレジンが作業部に残らないよう等、作業性を向上させるための加工となっている。

ハンドル部：ステンレススチール

【品目仕様等】

ISO 13485：2003 の規準に対応

【操作方法又は使用方法等】

歯科用仮封材等の歯科材料又は覆う材等の歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布するために用いる。

【使用上の注意】

本品は滅菌されていない。感染を引き起こす恐れがあるので、使用前には必ずオートクレーブによる滅菌を行うこと。高温の乾燥は、変色・変質の原因となるので避けること。

本品に過度の衝撃を与えないよう注意すること。

使用後、血液、体液、組織片等により汚染した器具は防錆洗浄剤又は、精製水を用いて速やかに除去すること。汚染物を付着したまま放置しておくと、付着物が除去しにくくなることもある。

洗浄、消毒、滅菌の際には、塩素イオンの影響で器具が腐食することがあるので、水道水は使用しないこと。

超酸化水（超酸性水）等は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。

以下に記載した薬剤は金属腐食を起こし、材質を変質させる恐れがあるので使用しないこと。

次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、消毒用エタノール、イソプロパノール、塩酸アルキルジアミノエチルグリシン

腐食の原因となるので、洗浄の際は、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

洗浄、消毒、滅菌後の器具はさびやシミ等の原因になるので、十分に乾燥させてから、保管すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

乾燥した場所に保管すること。

錆びている器具と一緒に収納保管しないこと。

ヨード・グリセリンなどの科学薬品と一緒に収納保管しないこと。

使用有効期間は特にないが、機能の低下が目立った場合は使用を止めること。

【包装】

1 パッケージにつき 1 本包装

【文献請求先】

〒176-0013

東京都練馬区豊玉中 2-18-14

株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ

住所：〒176-0013

東京都練馬区豊玉中 2-18-14

電話番号：03-3557-4111(代表)

第 3 種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：Integra York PA, Inc.

(アメリカ合衆国)