

販売名：カラフルボール

【禁忌・禁止】

- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 器具の形態変更や改造等はないこと。
- 長期使用した場合や機能の低下が目立った場合は、使用を中止し、適切に廃棄すること。
- 器具を落下させたり、強い衝撃などを与えないこと。

【形状・構造及び原理等】



原材料 PVC

サイズ

規格番号	直径	容量
904MBM	11.8cm	350cc
904MBL	12.8cm	600cc

色（上図 左から）

2C：ブルー 3C：イエロー 4C：グリーン

5C：レッド 10C：パープル

【性能・使用目的・効能又は効果】

歯科用印象材料を練和または混和するために用いる。

【品目仕様等】

ISO 13485:2003 の規準に対応

【操作方法又は使用方法等】

歯科用印象材料の中に入れ、ヘラなどで練和する。

【使用上の注意】

使用前に本品外観を目視によって異常がないか調べること。
本品に鋭利なヘラなどを使用しないこと。
器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
使用目的以外に使用しないこと。
必要以上の力を加えないこと。
破損や事故の原因となるので、切削・打刻・曲げなどの改造は絶対に行わないこと。
過度の衝撃を与えないよう注意すること。
使用前に十分な洗浄をすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。
洗浄後は乾燥させて保管すること。
歯科印象材料が付着したまま保管しないこと。
汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管、管理すること。
水分が付着したまま保管しないこと。
保管有効期間は特にないが、劣化や異常が見られる場合は使用を差し控えること。

【包装】

一袋 1 個入り

封印：目視できるよう透明の袋で包装している

【文献請求先】

〒176-0013
東京都練馬区豊玉中 2-18-14
株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ
住所：〒176-0013
東京都練馬区豊玉中 2-18-14
TEL：03-3557-4111(代表)

第 3 種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：Hsiner Co., Ltd.（台湾）