


一般医療機器:歯科用練成器
一般的名称:歯科用練成器具 70682000

販売名:イブミックス

【禁忌・禁止】

- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 器具の形態変更や改造等はしないこと。
- 長期使用した場合や機能の低下が目立った場合は使用を中止し、適切に廃棄すること。

【形状・構造及び原理等】

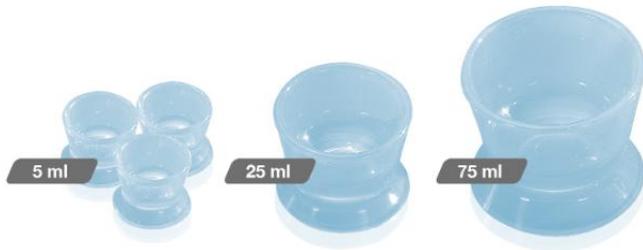

カタログ番号:C05, C25, C75

構造: C05: 5ml
C25: 25ml
C75: 75ml

原材料: シリコン

【使用目的、効能又は効果】

歯科用アクリル材料を練和または混和するために用いる

【品目仕様等】

CE マーキング規格によって品質管理が行われている。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用アクリル材料を中に入れ、ヘラなどで練和する

【使用上の注意】

- ① 本品に鋭利なヘラなどを使用しないこと。
- ② 本品に過度の衝撃を与えないよう注意すること。
- ③ 本品外観を目視によって異常がないか調べるこ
と。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ① 乾燥した場所に保管すること。
- ② 使用期間は特にないが、機能の低下が目立った場合は使用を止めること。

【包装】

C75 及び C25 は 1 パッケージにつき 1 個包装。
C05 は 1 パッケージにつき 3 個包装。

【文献請求先】

〒176-0013
東京都練馬区豊玉中 2-18-14
株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者: 株式会社コサカ
住所: 〒176-0013
東京都練馬区豊玉中 2-18-14
電話番号: 03-3557-4111(代表)

第3種医療機器製造販売業許可 I3B3X00551

外国製造業者: EVE Ernst Vetter GmbH
(ドイツ)