

機械器具 30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用手術用パンチ 35285012

クリーンカット

再使用禁止

****【禁忌・禁止】**

- 1.再滅菌禁止
- 2.再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	:コスモテック株式会社
電話番号	:03-5802-3830(代)
製造業者	:クエストメディカル社 (Quest Medical, Inc.)
製造業者の国名	:アメリカ合衆国

【形状・構造及び原理等】*1.形状・構造**

本品は、血管に孔を作成するために用いる手術器具であり、以下の構成部品からなる。

**2.原材料**

先端部	:ステンレススチール、アルミニウム、シリコーンオイル
本体部	:ABS樹脂

***【使用目的又は効果】**

本品は血管に孔を作製するために用いる。

【使用方法等】

<開封>

1. 清潔操作で包装を開封する。

<キャップの取り外し方>

1. サムボタンを最後まで押し込み、キャップを取り外す。
[この操作を省略すると、刃が鋭い為、キャップの内壁を削り取る可能性がある。]
2. サムボタンを元に戻した後、製品の破損や操作上の異常がないかを確認する。

<使用方法>

1. 切開部に先端部を入れ、切開部に対して本品を垂直に保ちながらサムボタンを最後まで押し切る。
2. サムボタンを押し切った状態のまま先端を抜く。
3. 穿孔が不十分な場合、先に切り取られた組織片を製品から取り除き、同じ操作を繰り返す。

****【使用上の注意】****1.重要な基本的注意**

- (1)縫合する血管に適したサイズを慎重に選定すること。
- (2)本品の先端部は刃になっているため取り扱いには十分注意すること。

****【保管方法及び有効期間等】****1.保管の条件**

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管すること。

2.有効期間

有効期間は自己認証による。使用期限は包装容器に記載。