

類別：機械器具 1 手術台及び治療台  
 一般医療機器 一般的名称：手術台アクセサリ、JMDN コード：70469000

## 体側支持器

### 【警告】


- 間違った患者のポジショニングにより生命機能が害される場合がある。正しく患者の位置を決めて、継続的な観察を維持すること。

### 【禁忌・禁止】

- 本製品は当社が認めた者以外、修理・保守点検できない。当社製以外のアクセサリは使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理】

- 構成
  - 本体ベース
  - 固定ネジ
  - パッド
- 各部の名称

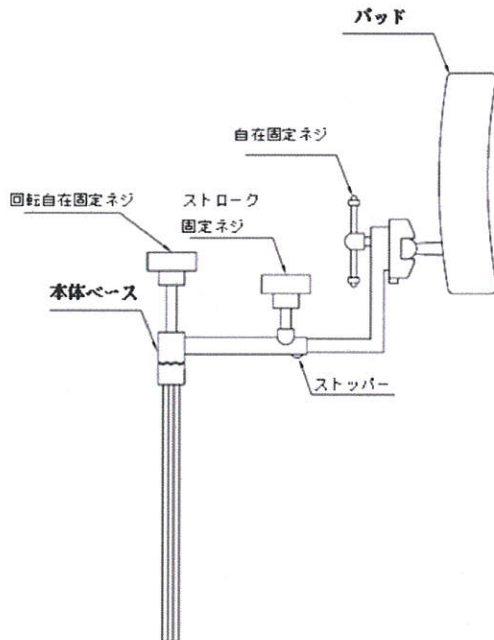

- 本体寸法及び質量
 

寸法 (mm) 幅:100±10、奥行き:270~350、高さ:550±10  
 質量 (Kg) 1.7±0.5

#### 4) 原理

本体側支持器は、手術台テーブルトップ側面のサイドレールに別途固定用の器具を使用して固定し、患者の体側を支持する。

### 【使用目的、効果・効能】

本体側支持器は、手術台上で患者の体側を支持することを目的とするアクセサリである。

### 【品目仕様】

- 本体寸法及び質量
 

寸法 (mm) 幅:100±10、奥行き:270~350、高さ:550±10  
 質量 (Kg) 1.7±0.5
- 体側支持時の耐荷重
 

最大：15 kg

### 【操作方法又は使用方法】

#### 使用環境条件

温度 常温  
 湿度 常湿

#### 設置上の注意

手術台等から脱落しないことを確認し、しっかりと固定すること。

#### 操作方法

- 本体側支持器を手術台に取り付ける。
- 患者の体側を、支持する。
- 手術終了後に、本体側支持器を取り外す。

### 【使用上の注意】

#### 1) 禁忌・禁止

- 摩耗またはダメージがある場合、しっかりと固定できない。完全な状態の製品のみを使用すること。
- ダメージのあるパッドは使用しないこと。

#### 2) その他

- 本アクセサリを廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

### 【貯蔵方法及び使用期間等】

#### 貯蔵方法

本製品は、清浄にして保管すること。

#### 使用耐用年数 (自主基準)

指定された保守点検を実施した場合に8年。ただし、パッド及びネジ等の消耗部品を除く。

#### 交換部品

保守部品の保有年数は、製造終了後3年。

### 【保守・点検に係る事項】

- 本製品は、年1回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社または取扱店に依頼してください。

#### 2) 使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容 (概要)
全体	毎回	キズ、摩耗なきこと
全体	毎回	汚れなきこと

#### 4) 業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
定期点検事項	毎年	定期点検表の各項目

### 【包装】

1台単位

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

#### 製造販売業者：

株式会社コンデックス  
 〒343-0823  
 埼玉県越谷市相模町 1-331-7  
 TEL 048-990-3333  
 FAX 048-990-3334

#### 製造業者：

株式会社 コンデックス 会津工場